

## 【ご使用にあたって】

- 本製品は治療用の製品ではありません。
- 使い始めは違和感がある場合があります。違和感がなくなるまでは長時間の使用を控えてください。
- 素材の特性上、保管状態により変色することがあります。
- 直射日光の当たる場所など、高温になる場所に放置しないでください。本製品の変形、劣化を引き起こす原因となります。

## 【使用上の注意—必ずお読みください—】

安全に関わる注意事項をその危険の大きさの程度に応じて次のように分類しています。

△警告……誤った使い方をすると、人が重傷を負う可能性がある内容

△注意……誤った使い方をすると、人が軽傷を負うか、または本製品以外の他の財物に損害を与える可能性がある内容

### △ 警告

- 足部にケガ、骨折、傷、痛み、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常がある場合は使用しないでください。使用中にこれらの異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し、医師に相談してください。使用を続けると症状が悪化する原因となります。
- 次のことを必ず守って正しく使用してください。正しく使用しないと、血行障害や負傷事故の原因となります。
  - ・サイズの合った製品を使用してください。
  - ・シューズに入っているインソールを取り出して使用してください。
  - ・本製品の改造、修理を行わないでください。

### △ 注意

- 本製品は、必ず靴下を履いた状態で使用してください。
- 本製品は、汗や摩擦などにより色落ちや他の生地の色移りする場合があります。

## 【お手入れ方法】

- 本製品は手洗いで洗濯できます。洗濯後は、絞らないようにタオルなどで水気を取り、日陰で干してください。
- 乾燥機やドライヤーなどは使用しないでください。高温による変形など製品をいためる原因となります。

※製品の仕様、外観などは改良のため予告なく変更することがあります。

※製品には万全を期しておりますが、万一不良などお気づきの点がございましたら当社までご連絡ください。