

【お手入れ方法】

⚠注意

- 色の薄いものと一緒に洗濯しないでください。色落ちや他の生地に色移りする場合があります。
- 他の衣類などと一緒に洗濯する場合は、洗濯ネットを使用してください。面ファスナーが他の衣類などにつくとほつれや伝線の原因となります。

●本製品は洗濯機で洗濯できます。洗濯後は日陰で吊り干しにしてください。
 ●洗濯の際は、面ファスナーを本体にとめてください。とめずに洗濯すると、面ファスナーのつきが悪くなるおそれがあります。
 ●アイロン、塩素系漂白剤は使用しないでください。酸素系漂白剤は使用できます。
 ●乾燥機を使用しないでください。製品をいためる原因となります。
 ●本製品はドライクリーニングできません。また、ウェットクリーニングはできますがタンブル乾燥は避けてください。

【素材】

素材	
繊維	ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
繊維以外	ポリスチレン、クロロブレン、ポリウレタン

※お願い：本製品を廃棄する際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。


【サイズ表】

サイズ	適用範囲（シューズサイズ）	1箱入数
M	21cm ~ 25cm	1コ
L	25cm ~ 29cm	

●サイズの選び方

シューズサイズに合わせて選んでください。シューズサイズが2サイズのさかいになった場合は、大きい方のサイズを選んでください。

- 本製品は左右兼用です。
- 本製品は使用状況により、必ずしもサポートできない場合があります。
- 本製品はアキレス腱の疾患を治療できるものではありません。
- 使用前にサイズが合っているか再度確認してください。サイズ表は本使用説明書のP.8にあります。

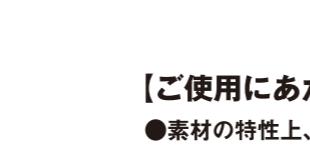

※製品の装着動画はこちらから見られます。

※製品の仕様、外観などは改良のため予告なく変更することがあります。

※製品には万全を期しておりますが、万一不良などお気づきの点がございましたら当社までご連絡ください。

日本シグマックス株式会社

〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1 お客様窓口 TEL.0800-222-7122 (通話料無料)
 受付時間：9時～17時（平日）※土日、祝日、年末年始を除く

ザムスト

AT-1

〔アキレス腱専用のソーター〕
 (左右兼用)

使用説明書

ZAMST >

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。安全にご利用いただきために、必ずご使用前に本使用説明書をお読みください。また、本使用説明書はいつでもお読みになれるよう大切に保管してください。

【使用上の注意—必ずお読みください】

本使用説明書では、安全に関わる注意事項をその危険の大きさの程度に応じて次のように分類しています。
 ▲警告…誤った使い方をすると、人が重傷を負う可能性がある内容
 ▲注意…誤った使い方をすると、人が軽傷を負うか、または本製品以外の他の財物に損害を与える可能性がある内容

⚠警告

- 異常の発生や症状の悪化を防ぐため、次の場合は使用しないでください。
 - ・アレルギー体質の方や皮膚が過敏な方。
 - ・装着部に骨折、傷、しごれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常がある場合。
- 次のことを必ず守って正しく使用してください。正しく使用しないと、血行障害や負傷事故の原因となります。
 - ・アキレス腱以外の部位に使用しないでください。
 - ・サイズの合った製品を使用してください（サイズ表は本使用説明書のP.8にあります）。
 - ・就寝時は使用しないでください。
 - ・長時間装着する場合は適宜装着し直してください。長時間の圧迫などによる皮膚障害や血行障害などを起こすことがあります。
 - ・上下、表裏、前後を正しく使用してください。
 - ・装着手順に従って正しく使用してください。
 - ・サポート本体や各種ストラップをきつく締めすぎないでください。
 - ・使用中にゆるんだり直したりしたときは、必ず手順の始めから正しく装着し直してください。
 - ・本製品に摩耗、損傷のある場合や面ファスナーのつきが悪くなつた場合は使用しないでください。
 - ・本製品の加工、改造、修理を行わないでください。
- 本製品の使用中に次の異常が発生した場合、ただちに使用を中止し、医師に相談してください。使用を続けると症状が悪化する原因となります。
 - ・つけこちが悪いなど違和感がある場合。
 - ・装着部にケガ、骨折、傷、痛み、しごれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常が生じた場合。

⚠注意


- 面ファスナーには硬い素材を使用しています。まれに指や肌を傷つける場合がありますので注意してください。
- 本製品は、必ず靴下などの上から装着し、肌に直接当たらないでください。
- 本製品は、汗や摩擦などにより色落ちや他の生地に色移りする場合があります。
- 面ファスナーが衣類につかないように装着してください。ほつれや伝線の原因となります。

【ご使用にあたって】

- 素材の特性上、保管状態により変色することがあります。
- 保管の際は、面ファスナーや起毛部分に過度の重みがかからないようにしてください。
 面ファスナーのつきが悪くなるおそれがあります。
- 自動車などを運転される際はソーターを外してください。ソーターを装着することにより、運転に支障が出る場合があります。

【各部の名称】

※本製品には左右兼用です。図は右足に装着しています。

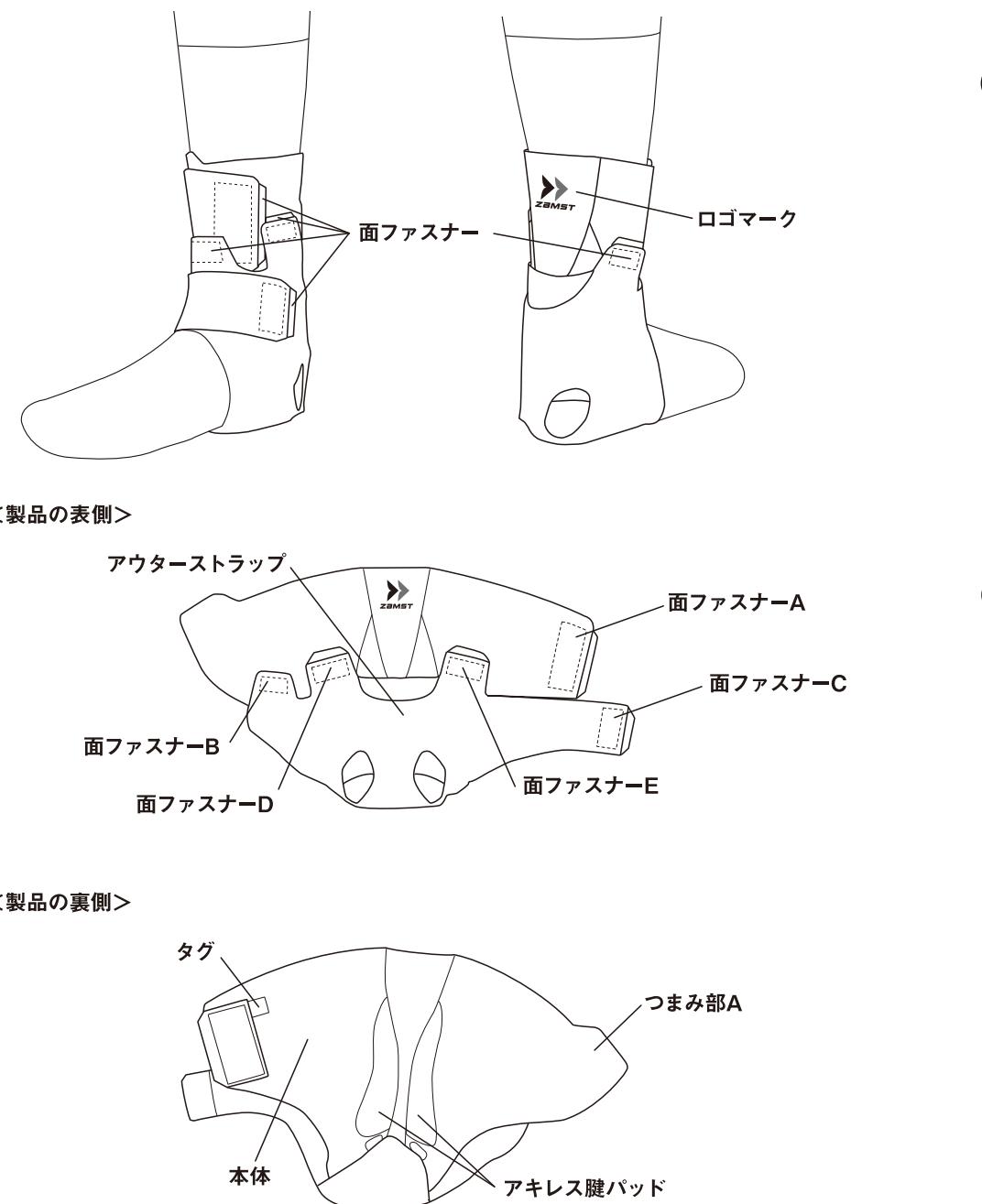


【装着手順】

●装着手前に本使用説明書P.2の【使用上の注意—必ずお読みください】をよく読んでから、手順通り正しく装着手してください。


●以下の装着手順は右足の場合です。左足に装着手する場合も同じように装着手してください。

① サポーター本体の面ファスナーをすべて取り外し、製品の上下・表裏・前後を確かめてください。

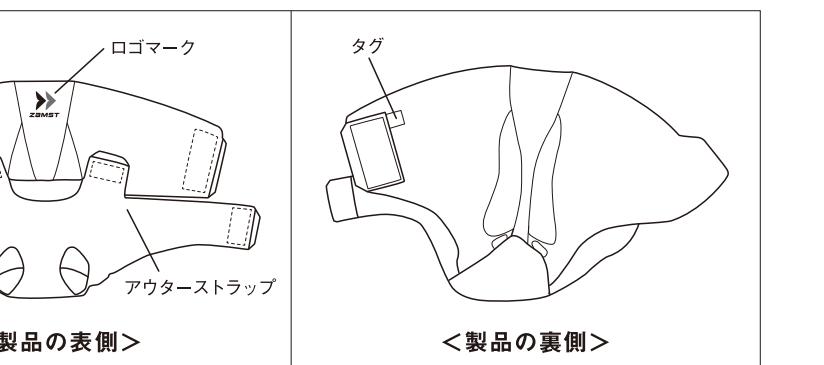


サポーター本体のロゴマークがついている方が上で、タグのついている方が体に当たる側になります。タグの矢印の向きで上下を確認してください。

② 足首を直角にしてサポーターの前側より足を入れ、本体のアキレス腱パッドをアキレス腱の両側に当てます。

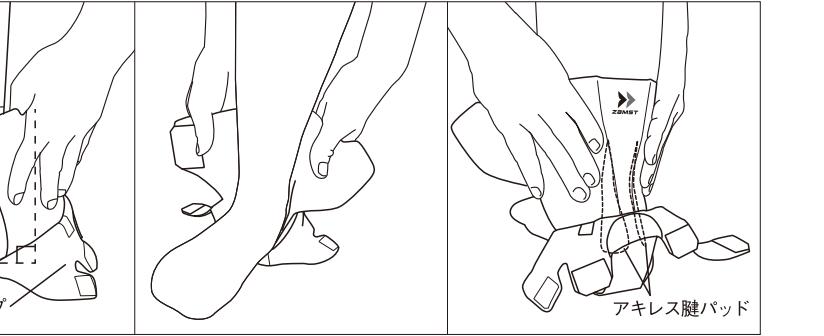


アウターストラップを外した状態で、本体のアキレス腱パッドがアキレス腱の両側にしっかりと沿うように当てます。

③ 面ファスナーAとつまみ部Aを持ち、適度な圧迫になるように引っ張り、足首に巻きつけるようにしてとめます。

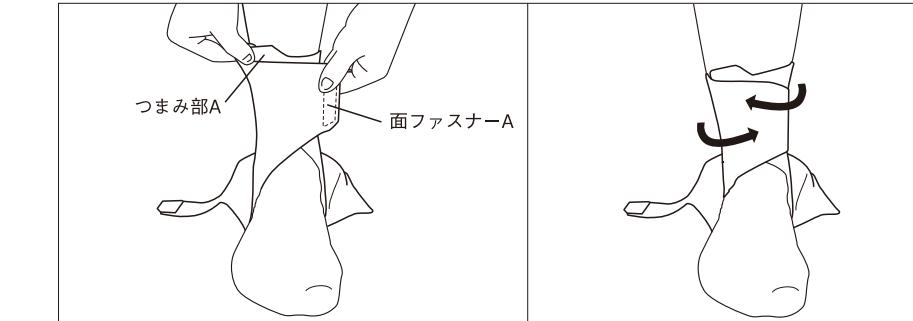


足の裏を床につけたまま、しっかりととめます。

④ アウターストラップの足底部分を前方にしっかりと引っ張ってから、面ファスナーBを斜め上に引き上げ、足首に巻きつけるようにしてとめます。

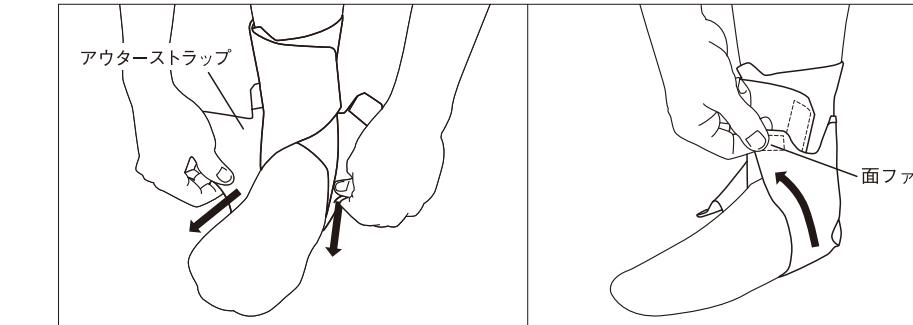


両手でアウターストラップの足底部分をつかみ、しっかりと前方に引っ張ってから、面ファスナーBを足首に巻きつけるようにしてとめます。

⑤ 面ファスナーCを適度な圧迫になるように引っ張り、足首に巻きつけるようにしてとめます。

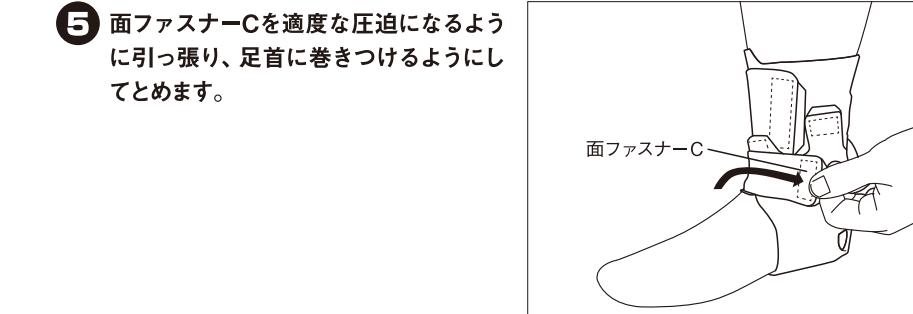


⑥ 面ファスナーDとEを両手で持ち、斜め上に引き上げ、とめます。

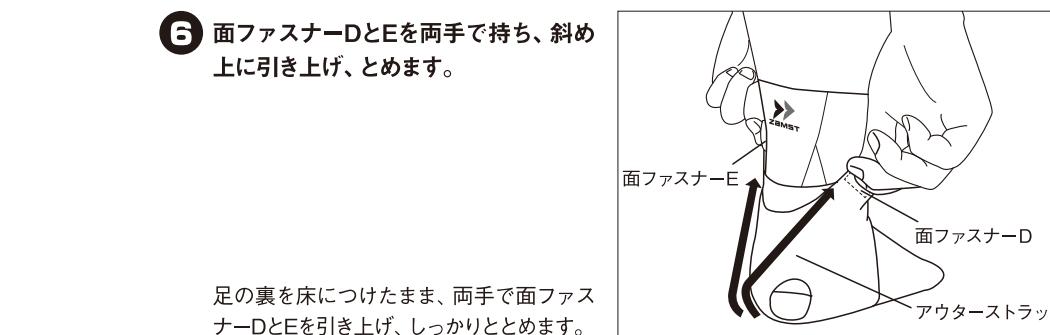


足の裏を床につけたまま、両手で面ファスナーDとEを引き上げ、しっかりととめます。

⑦ 適度な圧迫になるように、面ファスナーBとCの位置を調節します。

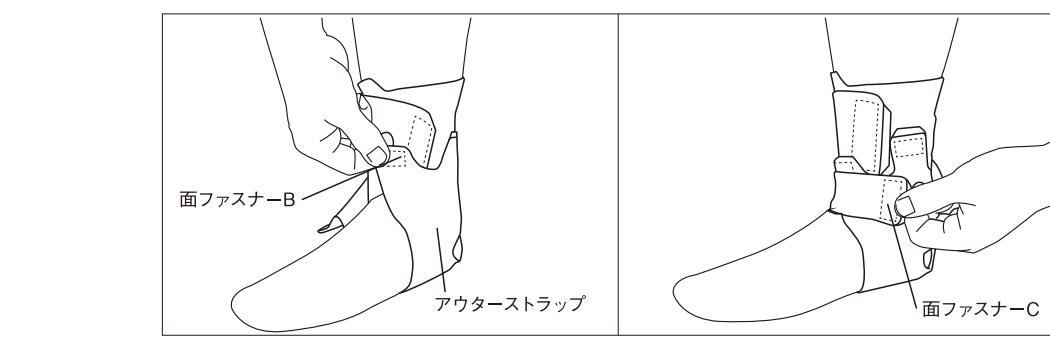

アウターストラップのしわやたるみが出ないように面ファスナーBとCを調節します。

⑧ サポーターのゆるみやズレがないか、確かめてください。違和感がある場合は、再度、始めから装着手してください。

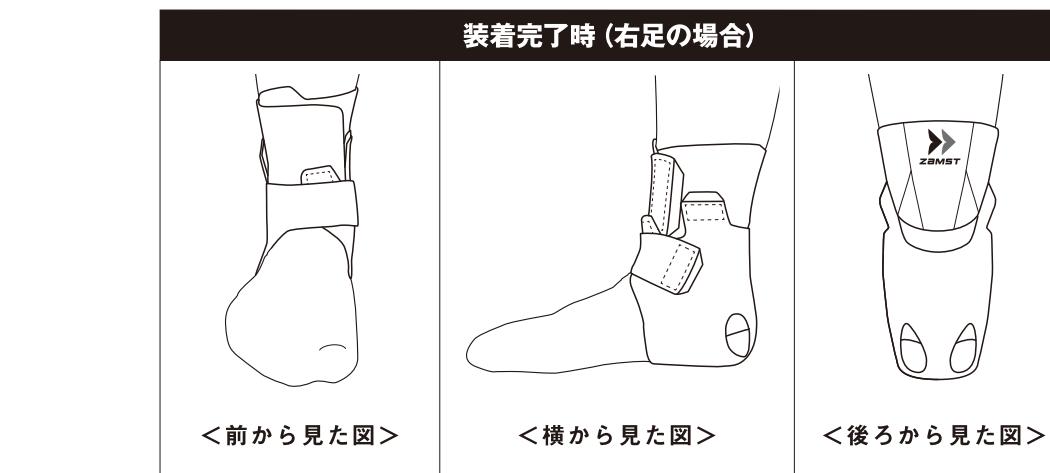

装着手完了時 (右足の場合)