


【サイズ表】

サイズ	適用範囲(ヒザ下の太さ)	1箱入数
S	28cm～31cm	1コ
M	31cm～34cm	
L	34cm～37cm	
LL	37cm～40cm	

● サイズの選び方

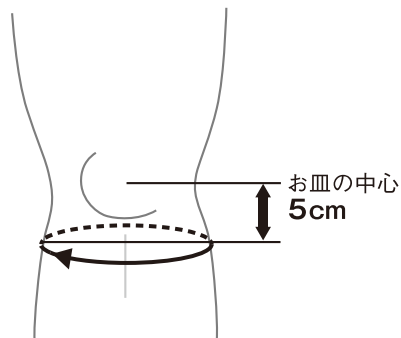

ヒザ下の太さに合わせて選んでください。
ヒザ下の太さは、普通に立った状態で
ヒザのお皿(膝蓋骨)の中心から5cm下
の太さを計測してください。
計測値が2サイズのさかいになった場合
は、大きい方のサイズを選んでください。
両脚に装着する場合は、左右の太さをそれ
ぞれ測って、正しいサイズを選んでください。



※製品の装着動画はこちらから見られます。

※お願い：本製品を廃棄する際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。
※製品の仕様、外観などは改良のため予告なく変更することがあります。
※製品には万全を期しておりますが、万一不良などお気づきの点がございましたら当社までご連絡ください。

日本シグマックス株式会社

〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1 お客様窓口：TEL.0800-222-7122(通話料無料)
受付時間 9時～17時(平日) ※土日、祝日、年末年始を除く

2022.03

ザムスト FILMISTA フィルミスタ ニー KNEE

[ヒザ用サポーター] 使用説明書



安全にご使用いただくために、必ず
ご使用前に本使用説明書をお読み
ください。またいつでもお読み
になれるように保管してください。

はじめにお読みください

- 本製品は左右兼用です。
- 本製品は使用状況によって、サポートできない場合があります。
- 本製品は治療用の製品ではありません。

ご使用にあたって

- 素材の特性上、保管状態により変色することがあります。
- 保管の際は、製品を強く押しつぶさないようにしてください。面ファスナーのつきが悪くなるおそれがあります。
- 高温多湿な場所に置かないでください。素材の劣化やはがれの原因となります。
- 素材の特性上、表面に小さなくぼみが発生する場合や、変色する場合がありますが、製品の機能には問題ありません。

【使用上の注意—必ずお読みください—】

本使用説明書では、安全に関わる注意事項をその危険の大きさの程度に応じて次のように分類しています。

⚠ 警告

誤った使い方をすると、人が重傷を負う可能性がある内容

⚠ 注意

誤った使い方をすると、人が軽傷を負うか、または本製品以外の他の財物に損害を与える可能性がある内容

⚠ 警告

- 異常の発生や症状の悪化を防ぐため、次の場合は使用しないでください。
 - ・アレルギー体質の方や皮膚が過敏な方。
 - ・装着部に骨折、傷、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常がある場合。
- 次のことを必ず守って正しく使用してください。正しく使用しないと、血行障害や負傷事故の原因となります。
 - ・ヒザ以外の部位に使用しないでください。
 - ・サイズの合った製品を使用してください。
 - ・就寝時は使用しないでください。
 - ・装着手順に従って正しく使用してください。
 - ・サポーター本体をきつく締めすぎないでください。
 - ・使用中にゆるんだりずれた場合は、正しく装着し直してください。また、長時間使用する場合は、過度の圧迫などに注意し、適宜装着し直してください。
 - ・本製品が摩耗、損傷した場合や面ファスナーのつきが悪くなった場合は使用しないでください。
 - ・本製品の加工、改造、修理を行わないでください。
- 本製品の使用中にケガ、骨折、痛み、しびれ、腫れ、湿疹などの異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し、医師に相談してください。使用を続けると症状が悪化する原因となります。

⚠ 注意

- 面ファスナーには硬い素材を使用しています。まれに指や肌を傷つける場合がありますので注意してください。
- 本製品は、肌に直接装着してください。衣類などの上に重ねて装着しないでください。
- 本製品は、汗や摩擦などにより色落ちや他の生地に移り染みする場合があります。
- 面ファスナーが衣類につかないように装着してください。ほつれや伝線の原因となります。


【お手入れ方法】

⚠ 注意

- 色の薄いものと一緒に洗濯しないでください。色落ちや他の生地に移り染みする場合があります。
- 他の衣類などと一緒に洗濯する場合は、ほつれや伝線为了避免のため、洗濯ネットを使用してください。


- 本製品は洗濯機で洗えます。洗濯後は日陰で吊り干しにしてください。
- 面ファスナーをとめて洗濯してください。とめずに洗濯すると、面ファスナーのつきが悪くなるおそれがあります。
- アイロン、塩素系漂白剤は使用しないでください。酸素系漂白剤は使用できます。
- 乾燥機は使用しないでください。製品をいためる原因となります。
- 本製品はドライクリーニングできません。また、ウェットクリーニングはできますがタンブル乾燥は避けてください。

【各部の名称】

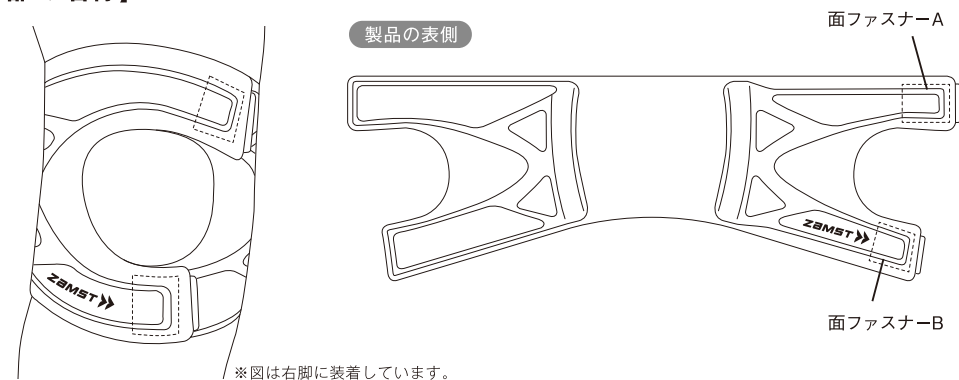


【装着手順】

- 装着前に本使用説明書P.2の【使用上の注意—必ずお読みください—】をよく読んでから、手順通り正しく装着してください。

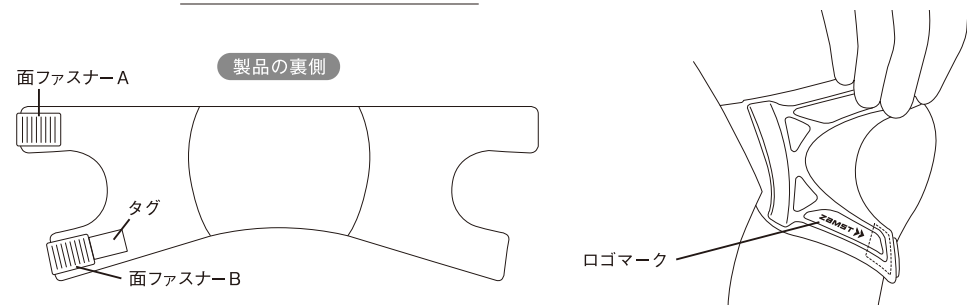

- 1 サポーター本体の面ファスナーをすべて取り外し、製品の向きを確認してください。タグの矢印の向きで上下を確認してください。

- 2 ロゴマークを下にしてヒザ裏にサポーターを当てます。

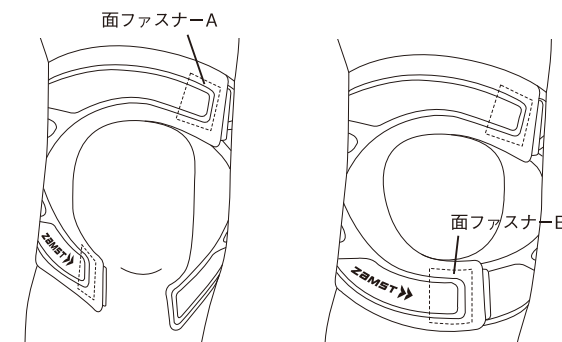

- 3 ヒザをまっすぐに伸ばして面ファスナーAをとめます。

- 4 ヒザをまっすぐに伸ばして面ファスナーBをとめます。

- 5 適度な圧迫になるようにそれぞれの面ファスナーの位置を調節します。
- 6 ヒザをまっすぐに伸ばして、サポーターを上下に引っ張り、たるみを直します。
- 7 サポーターのゆるみやずれがないか、確かめてください。違和感がある場合は、再度、始めから装着し直してください。

サポーター本体をきつく締めすぎると、しびれを起こす原因になりますので、ご注意ください