

ザムスト

FILMISTA

フィルミスタ アンクル ANKLE

[足首用サポーター]

使用説明書

ZAMST 

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。安全にご利用いただくために、必ずご使用前に本使用説明書をお読みください。また、本使用説明書はいつでもお読みになれるよう大切に保管してください。

【用途】

- 足首のサポート

【はじめにお読みください】

- 本製品は右足用・左足用があります。左右を確認のうえ、使用してください。
- 本製品は使用状況により、必ずしもサポートできない場合があります。
- 本製品は足首の疾患を治療できるものではありません。
- 使用前にサイズが合っているか再度確認してください。サイズ表は本使用説明書のP.6にあります。

【ご使用にあたって】

- 保管の際は、製品に過度の重みがかからないようにしてください。製品に折れやシワが発生したり、面ファスナーのつきが悪くなるおそれがあります。
- 高温多湿な場所に放置しないでください。素材の劣化やはがれの原因となります。
- 素材の特性上、表面に小さなくぼみが発生する場合や、変色する場合がありますが、製品の機能には問題ありません。

【使用上の注意ー必ずお読みくださいー】

本使用説明書では、安全に関わる注意事項をその危険の大きさの程度に応じて次のように分類しています。

△警告…誤った使い方をすると、人が重傷を負う可能性がある内容

△注意…誤った使い方をすると、人が軽傷を負うか、または本製品以外の他の財物に損害を与える可能性がある内容

△警告	<ul style="list-style-type: none">●異常の発生や症状の悪化を防ぐため、次の場合は使用しないでください。<ul style="list-style-type: none">・アレルギー体質の方や皮膚が過敏な方。・装着部に骨折、傷、しごれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常がある場合。●次のことを必ず守って正しく使用してください。正しく使用しないと、血行障害や負傷事故の原因となります。<ul style="list-style-type: none">・足首以外の部位に使用しないでください。・サイズの合った製品を使用してください（サイズ表は本使用説明書のP.6にあります）。・就寝時は使用しないでください。・長時間装着する場合は適宜装着し直してください。長時間の圧迫などによる皮膚障害や血行障害などを起こすおそれがあります。・表裏、前後を正しく使用してください。・装着手順に従って正しく使用してください。・サポーター本体をきつく締めすぎないでください。・使用中にゆるんだりずれたりしたときは、必ず手順の始めから正しく装着し直してください。・本製品に摩耗、損傷のある場合や面ファスナーのつきが悪くなった場合は使用しないでください。・本製品の加工、改造、修理を行わないでください。●本製品の使用中に次の異常が発生した場合、ただちに使用を中止し、医師に相談してください。使用を続けると症状が悪化する原因となります。<ul style="list-style-type: none">・つけごこちが悪いなど違和感がある場合。・装着部にケガ、骨折、傷、痛み、しごれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常が生じた場合。
△注意	<ul style="list-style-type: none">●面ファスナーには硬い素材を使用しています。まれに指や肌を傷つける場合がありますので注意してください。●本製品は、肌に直接装着してください。衣類などの上に重ねて装着しないでください。●本製品は、汗や摩擦などにより色落ちや他の生地に色移りする場合があります。●面ファスナーが衣類につかないように装着してください。ほつれや伝線の原因となります。


【お手入れ方法】

△注意	<ul style="list-style-type: none">●色の薄いものと一緒に洗濯しないでください。色落ちや他の生地に色移りする場合があります。●他の衣類などと一緒に洗濯する場合は、洗濯ネットを使用してください。面ファスナーが他の衣類などにつくとほつれや伝線の原因となります。
-----	---


- 本製品は洗濯機で洗濯できます。洗濯後は日陰で吊り干ししてください。
- 洗濯の際は、面ファスナーを本体にとめてください。とめずに洗濯すると、面ファスナーのつきが悪くなるおそれがあります。
- アイロン、塩素系漂白剤は使用しないでください。酸素系漂白剤は使用できます。
- 乾燥機を使用しないでください。製品をいためる原因となります。
- 本製品はドライクリーニングできません。また、ウェットクリーニングはできますがタンブル乾燥は避けてください。
- アルコール、ベンジンなどは使用しないでください。製品をいためる原因となります。

【各部の名称】


※本製品には右足用・左足用があります。図は右足に装着しています。

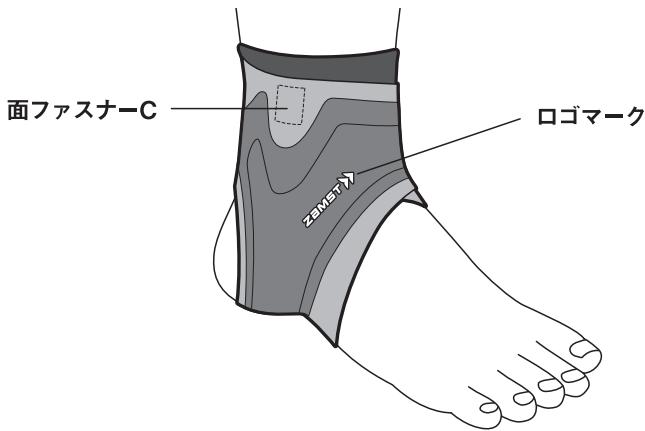

<製品の表側>

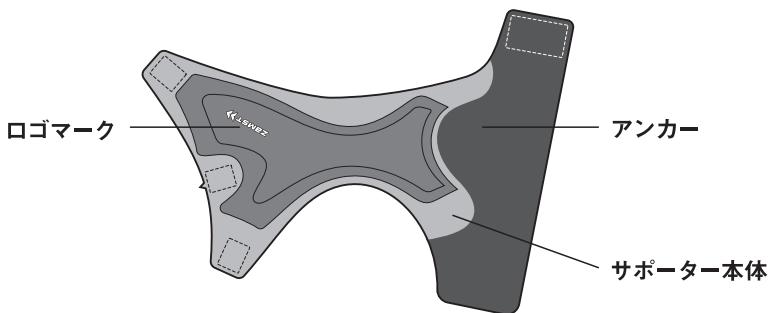


<製品の裏側>

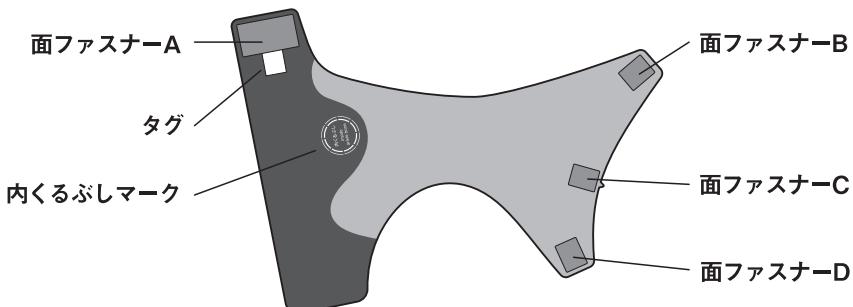

【装着手順】


- 装着前に本使用説明書P.2の【使用上の注意—必ずお読みください—】をよく読んでから、手順通り正しく装着してください。
- 以下の装着手順は右足の場合です。左足に装着する場合も同じように装着してください。

- ①** サポーター本体の面ファスナーをすべて取り外し、製品の表裏・前後を確かめてください。

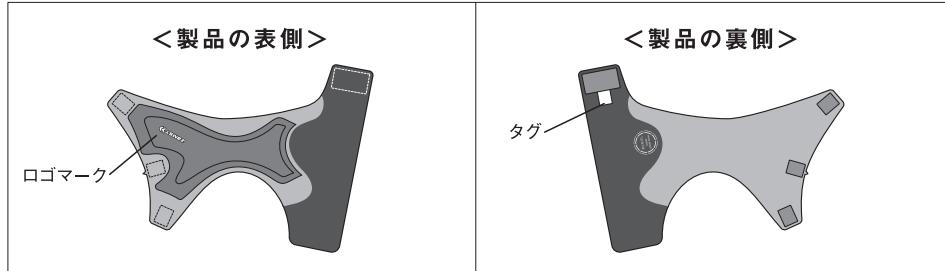


アンカー裏側のタグがついている方が体に当てる側になります。

- ②** 製品を内くるぶしに当てます。

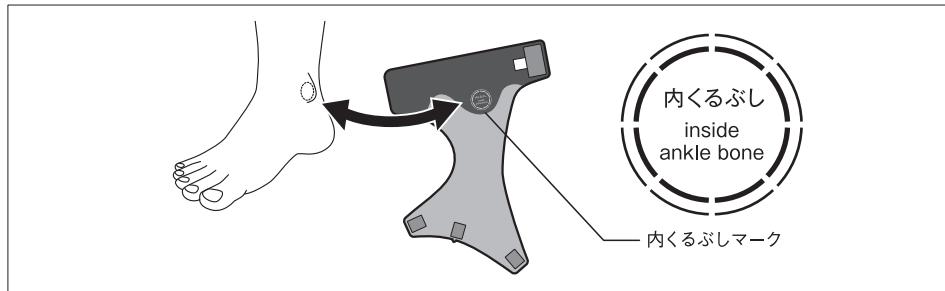


アンカー裏側の内くるぶしマークを内くるぶしに当ててください。

- ③** アンカーを足首に巻きつけ、面ファスナーAをとめます。

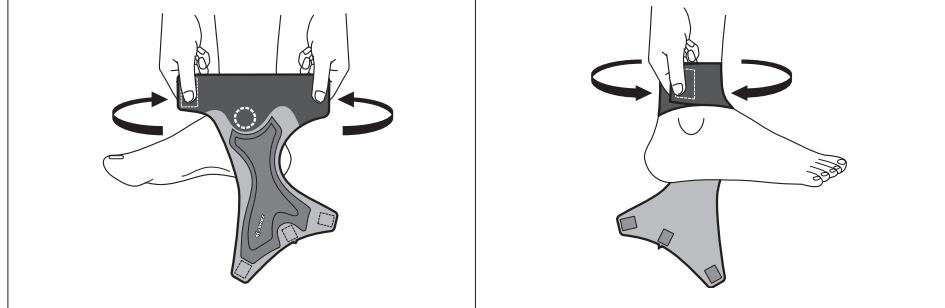


内くるぶしマークの位置がずれないように引っ張り、シワやたるみが出ないようにしっかりと締めてください。

- 4** 足首を直角にしてかかとを外側へ押し込むようにソーター本体を引っ張り、面ファスナーCを外くるぶしの上まで引き上げてとめます。

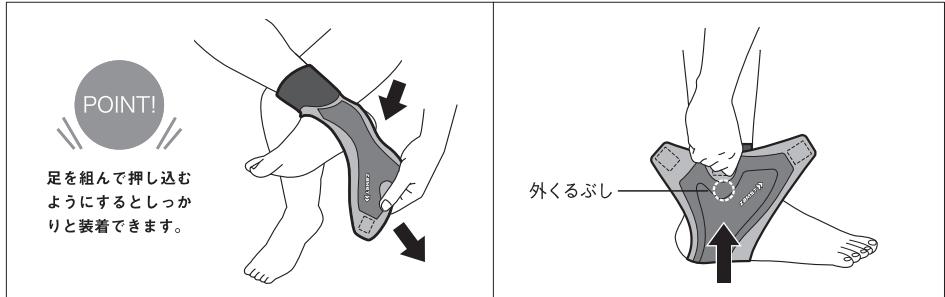

面ファスナーCが外くるぶしの上まで引き上げられない場合は、再度ソーター全体をしっかりと伸ばしながら引き上げてください。


- 5** 面ファスナーBと面ファスナーDを適度な圧迫になるように引っ張り、足首に巻きつけるようにとめます。

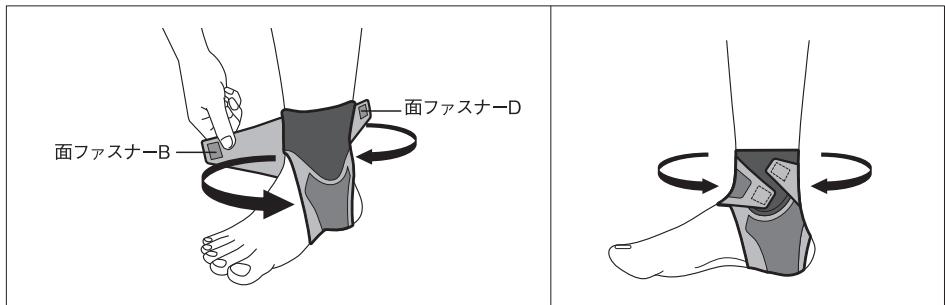

適度な圧迫になるまでそれぞれの面ファスナーのとめ直しを繰り返し行ってください。面ファスナーBと面ファスナーDが重なるようであれば上下にずらしてください。

- 6** ソーターのゆるみやズレがないか、確かめてください。違和感がある場合は、再度、始めから装着し直してください。

装着完了時(右足の場合)

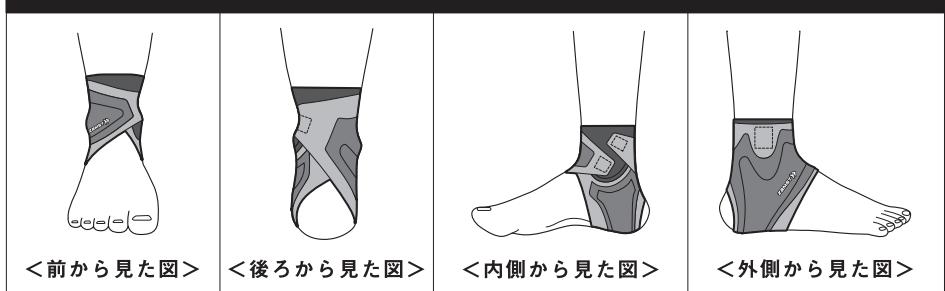


【素材】

素材	
繊維	ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル
繊維以外	ポリウレタン、ポリエステル

※お願い：本製品を廃棄する際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

【サイズ表】

サイズ		適用範囲(ヒール囲)	目安(シューズサイズ)	1箱入数
右S	左S	27cm～30cm	22.0cm～24.5cm	1コ
右M	左M	30cm～33cm	24.0cm～26.5cm	
右L	左L	33cm～36cm	26.0cm～28.5cm	

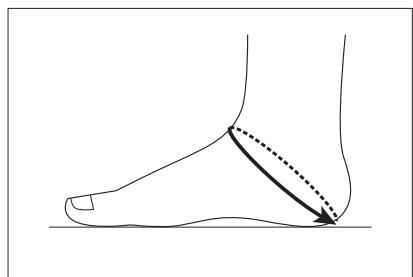

●サイズの選び方

ヒール囲に合わせて選んでください。ヒール囲はかかとと足首前方を通る周囲を計測してください。計測値が2サイズのさかいになった場合は、大きい方のサイズを選んでください。シューズのサイズは目安です。

両足に装着する場合は、左右の太さをそれぞれ測って、正しいサイズを選んでください。

※製品の仕様、外観などは改良のため予告なく変更することがあります。

※製品には万全を期しておりますが、万一不良などお気づきの点がございましたら当社までご連絡ください。



〒163-6033 東京都新宿区西新宿6-8-1 お客様窓口 TEL.0800-222-7122 (通話料無料)
受付時間：9時～17時 (平日) ※土日、祝日、年末年始を除く

パッケージを廃棄する際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

パッケージ本体：段ボール(古紙配合率約90%)／フック：プラスチック(PP)

窓：プラスチック(PET)