

# ガムスト HA-1

[機能性ソックス]

## 使用説明書

# ZAMST

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。安全にご利用いただくために、必ずご使用前に本使用説明書をお読みください。また、本使用説明書はいつでもお読みになれるよう大切に保管してください。

### [はじめにお読みください]

- 本製品は右用・左用があります。左右を確認のうえ、使用してください。左右の確認は、足の甲部分にあるR、Lのしるしをご確認ください。(R:右足用、L:左足用)
- 本製品は使用状況により、必ずしもサポートできない場合があります。
- 本製品は足部の疾患を治療できるものではありません。
- 使用前にサイズが合っているか再度確認してください。サイズ表は本使用説明書のP.2にあります。

### [ご使用にあたって]

- アーチリフト・ヒールコントロール部分にスジが入っているように見える場合がありますが、品質には問題ありません。
- 素材の特性上、保管状態により変色することがあります。

### [使用上の注意—必ずお読みください—]

本使用説明書では、安全に関わる注意事項をその危険の大きさの程度に応じて次のように分類しています。


- △警告…誤った使い方をすると、人が重傷を負う可能性がある内容
- △注意…誤った使い方をすると、人が軽傷を負うか、または本製品以外の他の財物に損害を与える可能性がある内容

<b>△警告</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●異常の発生や症状の悪化を防ぐため、次の場合は使用しないでください。             <ul style="list-style-type: none"> <li>・アレルギー体質の方や皮膚が過敏な方。</li> <li>・装着部に骨折、傷、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常がある場合。</li> </ul> </li> <li>●次のことを必ず守って正しく使用してください。正しく使用しないと、血行障害や負傷事故の原因となります。             <ul style="list-style-type: none"> <li>・足部以外の部位に使用しないでください。</li> <li>・サイズの合った製品を使用してください(サイズ表は本使用説明書のP.2にあります)。</li> <li>・就寝時は使用しないでください。</li> <li>・表裏、左右を正しく使用してください。</li> <li>・本製品に摩耗、損傷のある場合は使用しないでください。</li> <li>・本製品の加工、改造、修理を行わないでください。</li> </ul> </li> <li>●本製品の使用中に次の異常が発生した場合、ただちに使用を中止し、医師に相談してください。使用を続けると症状が悪化する原因となります。             <ul style="list-style-type: none"> <li>・つけごこちが悪いなど違和感がある場合。</li> <li>・装着部にケガ、骨折、傷、痛み、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常が生じた場合。</li> </ul> </li> </ul>
<b>△注意</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本製品は、汗や摩擦などにより色落ちや他の生地に移りやすくなります。</li> </ul>

## 【お手入れ方法】

**△注意** ●色の薄いものと一緒に洗濯しないでください。色落ちや他の生地に色移りする場合があります。

- 本製品は洗濯機で洗濯できます。洗濯後は日陰で吊り干しにしてください。
- アイロン、塩素系漂白剤は使用しないでください。酸素系漂白剤は使用できます。
- 乾燥機を使用しないでください。製品をいためる原因となります。
- 本製品はドライクリーニングできません。また、ウェットクリーニングはできますがタンブル乾燥は避けてください。

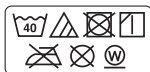

## 【素材】

### 素材

綿、アクリル、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル

※お願い：本製品を廃棄する際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

## 【サイズ表】

サイズ	タイプ	適用範囲(シューズサイズ)	1箱入数
SS	ショート	21cm ~ 23cm	1足
S	ショート	23cm ~ 25cm	
	レギュラー		
M	ショート	25cm ~ 27cm	
	レギュラー		
L	ショート	27cm ~ 29cm	
	レギュラー		

## ●サイズの選び方

シューズサイズに合わせて選んでください。

計測値が2サイズのさかいになった場合は、大きい方のサイズを選んでください。

※製品の仕様、外観などは改良のため予告なく変更することがあります。

※製品には万全を期しておりますが、万一不良などお気づきの点がございましたら当社までご連絡ください。

 **SIGMAX** 日本シグマックス株式会社

〒163-6033 東京都新宿区西新宿6-8-1 お客様窓口 TEL.0800-222-7122 (通話料無料)  
受付時間：9時～17時(平日) ※土日、祝日、年末年始を除く

パッケージを廃棄する際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

パッケージ本体：段ボール(古紙配合率約90%) / フック：プラスチック(PP)

168383