

【はじめにお読みください】

- 本製品は右足用・左足用があります。左右を確認のうえ、使用してください。左右は、足の甲部分にR、Lの表示で示しています。
(R:右足用、L:左足用)
- 本製品は使用状況により、必ずしもサポートできない場合があります。
- 本製品は足部の疾患を治療できるものではありません。
- 使用前にサイズが合っているか再度確認してください。サイズ表は本使用説明書の裏面にあります。

【ご使用にあたって】

- アーチリフト・ヒールコントロール部分にスジが入っているように見える場合がありますが、品質には問題ありません。
- 素材の特性上、保管状態により変色することがあります。

【使用上の注意 一必ずお読みくださいー】

本使用説明書では、安全に関わる注意事項をその危険の大きさの程度に応じて次のように分類しています。

- △警告…誤った使い方をすると、人が重傷を負う可能性がある内容
△注意…誤った使い方をすると、人が軽傷を負うか、または本製品以外の他の財物に損害を与える可能性がある内容

▲警告	<ul style="list-style-type: none">●異常の発生や症状の悪化を防ぐため、次の場合は使用しないでください。<ul style="list-style-type: none">・アレルギー体質の方や皮膚が過敏な方。・装着部に骨折、傷、しづれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常がある場合。●次のことを必ず守って正しく使用してください。正しく使用しないと、血行障害や負傷事故の原因となります。<ul style="list-style-type: none">・足部以外の部位に使用しないでください。・サイズの合った製品を使用してください（サイズ表は本使用説明書の裏面にあります）。・就寝時は使用しないでください。・表裏、左右を正しく使用してください。・本製品に摩耗、損傷のある場合は使用しないでください。・本製品の加工、改造、修理を行わないでください。●本製品の使用中に次の異常が発生した場合、ただちに使用を中止し、医師に相談してください。使用を続けると症状が悪化する原因となります。<ul style="list-style-type: none">・つけごちが悪いなど違和感がある場合。・装着部にケガ、骨折、傷、痛み、しづれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常が生じた場合。
▲注意	<ul style="list-style-type: none">●本製品は、汗や摩擦などにより色落ちや他の生地に色移りする場合があります。

【お手入れ方法】

▲注意	<ul style="list-style-type: none">●色の薄いものと一緒に洗濯しないでください。 色落ちや他の生地に色移りする場合があります。
-----	---

- 本製品は洗濯機で洗濯できます。洗濯後は日陰で吊り干しにしてください。
- アイロン、塩素系漂白剤は使用しないでください。酸素系漂白剤は使用できます。
- 乾燥機を使用しないでください。製品をいためる原因となります。
- 本製品はドライクリーニングできません。また、ウェットクリーニングはできますがタンブル乾燥は避けてください。

