



【IW-2の使用手法】

- アイスバッグをアイスバッグポケットに収納し、形を整えます。


アイスバッグポケットは3つあります。冷やす部分に合わせてアイスバッグをセットしてください。

<肩に装着する場合>

- ① 付属のズレどめストラップの一方の面ファスナーを下図の位置を目安に取り付けます。

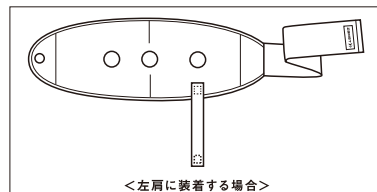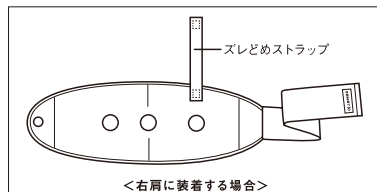


- ② 指通し穴が前にくるように持ち、肩の冷やしたい部分に当てます。
指通し穴に指をかけ、身体に巻くように引っ張ってゴムストラップをとめます。

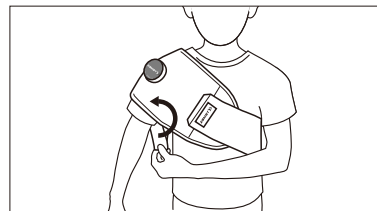

- ③ ズレどめストラップを引っ張り本体前面にとめます。
アイシングラップのゆるみやズレがないか、確かめてください。違和感がある場合は、再度、始めから装着し直してください。

<腰に装着する場合>

付属のズレどめストラップは使用せずに、冷やしたい部分に当て、ゴムストラップを引っ張り、面ファスナーをとめます。

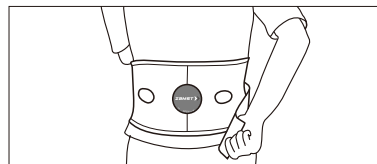

※製品の装着動画はこちらから見られます。



※お願い：本製品を廃棄する際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

※製品の仕様、外観などは改良のため予告なく変更することがあります。

※製品には万全を期しておりますが、万一不良などお気づきの点がございましたら当社までご連絡ください。

日本シグマックス株式会社

〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1 お客様窓口：TEL.0800-222-7122 (通話料無料)

受付時間：9時～17時（平日） ※土日、祝日、年末年始を除く

2022.03

ザムスト

アイスバッグ IW-1 IW-2

[冰のう、アイシングラップ]

使用説明書

ZAMST ➔

安全にご使用いただくために、必ず
ご使用前に本使用説明書をお読み
ください。またいつでもお読みにな
れるよう保管してください。

はじめにお読みください

- 本使用説明書はアイスバッグ、IW-1およびIW-2に共通です。ご使用にあたっては、お買い求めいただいた製品に該当する説明をご覧ください。
- IW-1・2は左右兼用です。
- IW-1はアイスバッグのS・Mサイズに対応しています。
- IW-2はアイスバッグの全サイズに対応しています。
- 本製品は使用状況によって、冷却・固定・圧迫できない場合があります。
- 本製品は治療用の製品ではありません。

ご使用にあたって

<アイスバッグ、IW-1、IW-2共通>

- 素材の特性上、保管状態により変色することがあります。

<アイスバッグ>

- 角がとがった氷を中に入れると、アイスバッグ内部のコーティングに傷がつき、水もれを起こすおそれがあります。氷はくたくた、少量の水を入れて表面を滑らかにした上で使用してください。

<IW-1、IW-2>

- 保管の際は、製品を強く押しつぶさないようにしてください。面ファスナーのつぎが悪くなるおそれがあります。

2022.03
168339

【使用上の注意—必ずお読みください—】

本使用説明書では、安全に関わる注意事項をその危険の大きさの程度に応じて次のように分類しています。



警告

誤った使い方をすると、人が重傷を負う
可能性がある内容



注意

誤った使い方をすると、人が軽傷を負うか、または
本製品以外の他の財物に損害を与える可能性が
ある内容



警告

<アイスバッグ、IW-1、IW-2共通>

●異常の発生や症状の悪化を防ぐため、次の場合は使用しないでください。

・アレルギー体質の方や皮膚が過敏な方。

本製品は天然ゴムを使用しています。天然ゴムはラテックス・アレルゲンを含み、かゆみ、じんましん、呼吸困難などのアレルギー症状を引き起こすことがあります。症状が出た場合は、ただちに使用を中止し、医師の診察をうけてください。

・装着部に傷、しびれ、湿疹、かぶれなどの異常がある場合。

●次のことを必ず守って正しく使用してください。正しく使用しないと、血行障害や負傷事故の原因となります。

・冷却、冷却材の固定および患部の圧迫以外の用途で使用しないでください。

・就寝時は使用しないでください。

・本製品が摩耗、損傷した場合や面ファスナーのつきが悪くなった場合は使用しないでください。

・本製品の加工、改造、修理を行わないでください。

●本製品の使用中に、ケガ、痛み、しびれ、湿疹などの異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し、医師に相談してください。使用を続けると症状が悪化する原因となります。

<IW-1、IW-2>

●次のことを必ず守って正しく使用してください。正しく使用しないと、血行障害や負傷事故の原因となります。

・サイズの合った製品を使用してください。

・装着手順に従って正しく使用してください。

・サポーター本体やストラップをきつく締めすぎないでください。

・使用中にゆるんだりずれたりした場合は、正しく装着し直してください。

また、長時間使用する場合は、血行障害や凍傷などに注意し、適宜装着し直してください。



注意

<アイスバッグ、IW-1、IW-2共通>

●本製品は、汗や摩擦などにより色落ちや他の生地に移り場合があります。

<アイスバッグ>

●水や氷を入れた後、ふたをしっかりと閉めてください。使用中にふたが外れて中の水や氷が漏れ、衣類や身体が濡れるおそれがあります。

●結露により、衣類や冷却部分が濡れることがあります。

<IW-1、IW-2>

●面ファスナーには硬い素材を使用しています。まれに指や肌を傷つける場合がありますので注意してください。

●面ファスナーが衣類につかないように装着してください。ほつれや伝線の原因となります。

【お手入れ方法】



注意

- 色の薄いものと一緒に洗濯しないでください。色落ちや他の生地に移り場合があります。
- 他の衣類などと一緒に洗濯する場合は、ほつれや伝線避けるため、洗濯ネットを使用してください。

<アイスバッグ>

●本製品は手洗いで洗濯できます。押し洗いし、絞らずタオルなどで水気を取って、日陰で吊り干しにしてください。

●アイロン、塩素系漂白剤・酸素系漂白剤は使用しないでください。製品をいためる原因となります。

●乾燥機は使用しないでください。製品をいためる原因となります。

●本製品はドライクリーニングもウェットクリーニングもできません。

<IW-1、IW-2>

●本製品は洗濯機で洗えます。洗濯後は日陰で吊り干しにしてください。

●面ファスナーをとめて洗濯してください。とめずに洗濯すると、面ファスナーのつきが悪くなるおそれがあります。

●アイロン、塩素系漂白剤は使用しないでください。酸素系漂白剤は使用できます。

●乾燥機は使用しないでください。製品をいためる原因となります。

●本製品はドライクリーニングできません。また、ウェットクリーニングはできますがタンブル乾燥は避けてください。

【アイスバッグの使用法】

●使用前に本使用説明書P.2の【使用上の注意—必ずお読みください—】をよく読んでから、手順通り正しく使用してください。



- ① アイスバッグの3/4くらいまで氷を入れてください。そのとき、氷と一緒に少量の水を入れると、体に密着しやすくなります。
- ② アイスバッグの中の空気をできるだけ抜いて、ふたをしっかりと閉めてください。
- ③ 患部に当ててください。


【サイズ表】アイスバッグ

サイズ	直径	1箱入数
S	約15cm	1コ
M	約23cm	
L	約26cm	


【各部の名称】

<IW-1>

<製品の表側>

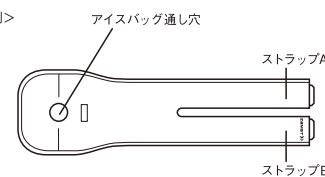


<製品の裏側>

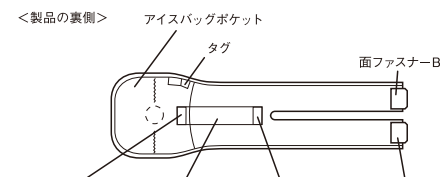


<IW-2>

<製品の表側>

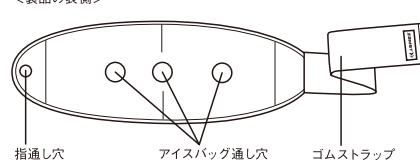

<製品の裏側>

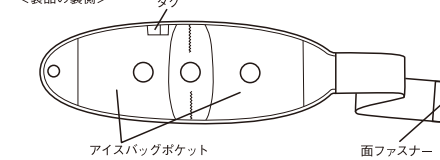


【装着手順】


- 装着前に本使用説明書P.2の【使用上の注意—必ずお読みください—】をよく読んでから、手順通り正しく装着してください。

【IW-1の使用法】

- ① アイスバッグをアイスバッグポケットに収納し、形を整えます。

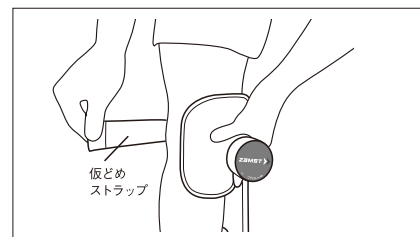

- ② 冷やしたい部分に当てて仮止め面ファスナーを本体にとめます。仮止めストラップがきつい場合は無理にとめる必要はありません。その場合、仮止め面ファスナーを仮止めナッキングにとめておいてください。

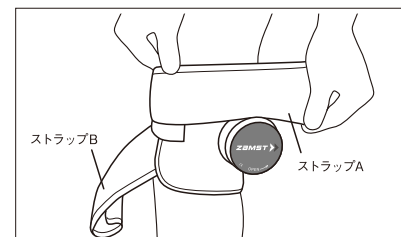

- ③ ストラップを巻きつけます。アイシングラブのゆるみやズレがないか、確かめてください。違和感がある場合は、再度、始めから装着し直してください。