



【各部の名称】


※本製品は左右兼用です。図は右脚に装着しています。

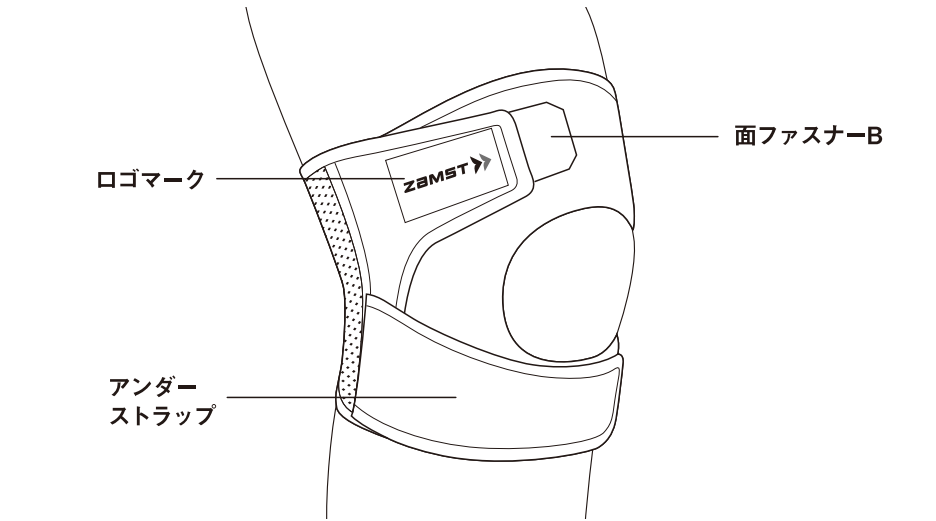

<製品の表側>

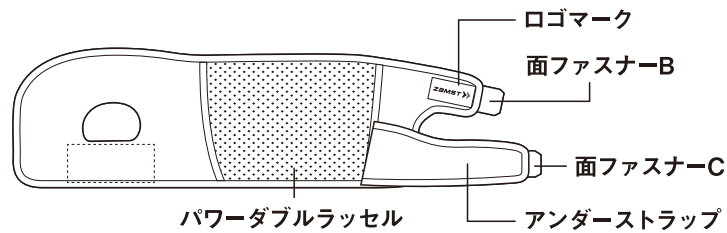

<製品の裏側>

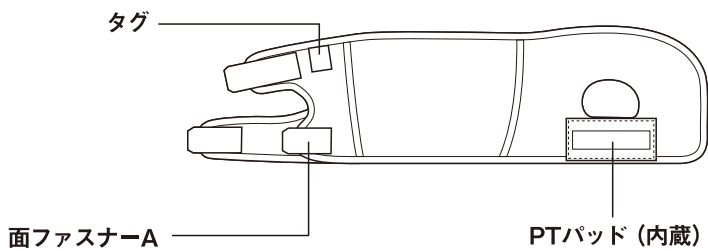

【素材】


素材	
繊維	ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
繊維以外	ポリウレタン、ポリスチレン、ポリエチレン

※お願い：本製品を廃棄する際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

【サイズ表】

サイズ	適用範囲（ヒザ下の太さ）	1箱入数
S	29cm ～ 32cm	1コ
M	32cm ～ 35cm	
L	35cm ～ 39cm	

●サイズの選び方

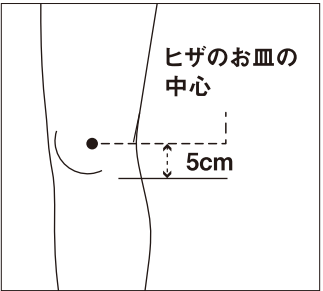

ヒザ下の太さに合わせて選んでください。ヒザ下の太さは、普通に立った状態でヒザのお皿（膝蓋骨）の中心から5cm下の太さを計測してください。
計測値が2サイズのさかいになった場合は、大きい方のサイズを選んでください。
両脚に装着する場合は、左右の太さをそれぞれ測って、正しいサイズを選んでください。

※製品の装着動画はこちらから見られます。



※製品の仕様、外観などは改良のため予告なく変更することがあります。
※製品には万全を期しておりますが、万一不良などお気づきの点がございましたら当社までご連絡ください。

日本シグマックス株式会社

〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1 お客様窓口 TEL.0800-222-7122（通話料無料）
受付時間：9時～17時（平日）※土日、祝日、年末年始を除く

2022.03

ザムスト

JK-1

【ヒザ用サポーター】
（左右兼用）

使用説明書

ZAMST

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。安全にご利用いただくために、必ずご使用前に本使用説明書をお読みください。また、本使用説明書はいつでもお読みになれるよう大切に保管してください。

【用途】

●ヒザのサポート

【はじめにお読みください】

- 本製品は左右兼用です。
- 本製品は使用状況により、必ずしもサポートできない場合があります。
- 本製品はヒザの疾患を治療できるものではありません。
- 使用前にサイズが合っているか再度確認してください。サイズ表は本使用説明書のP.6にあります。

【ご使用にあたって】

- ヒザ裏のメッシュ生地に面ファスナーをつけないでください。メッシュ生地をいためる原因となります。
- 素材の特性上、保管状態により変色することがあります。
- 保管の際は、面ファスナーや起毛部分に過度の重みがかからないようにしてください。面ファスナーのつきが悪くなるおそれがあります。

【使用上の注意－必ずお読みください－】

本使用説明書では、安全に関わる注意事項をその危険の大きさの程度に応じて次のように分類しています。

⚠警告…誤った使い方をすると、人が重傷を負う可能性がある内容

⚠注意…誤った使い方をすると、人が軽傷を負うか、または本製品以外の他の財物に損害を与える可能性がある内容

⚠警告

- 異常の発生や症状の悪化を防ぐため、次の場合は使用しないでください。
 - ・アレルギー体質の方や皮膚が過敏な方。
 - ・装着部に骨折、傷、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常がある場合。
- 次のことを必ず守って正しく使用してください。正しく使用しないと、血行障害や負傷事故の原因となります。
 - ・ヒザ以外の部位に使用しないでください。
 - ・サイズの合った製品を使用してください（サイズ表は本使用説明書のP.6にあります）。
 - ・就寝時は使用しないでください。
 - ・長時間装着する場合は適宜装着し直してください。長時間の圧迫などによる皮膚障害や血行障害などを起こすおそれがあります。
 - ・上下、表裏、前後を正しく使用してください。
 - ・装着手順に従って正しく使用してください。
 - ・サポーター本体やストラップをきつく締めすぎないでください。
 - ・使用中にゆるんだりずれたりしたときは、必ず手順の始めから正しく装着し直してください。
 - ・本製品に摩耗、損傷のある場合や面ファスナーのつきが悪くなった場合は使用しないでください。
 - ・本製品の加工、改造、修理を行わないでください。
- 本製品の使用中に次の異常が発生したら、ただちに使用を中止し、医師に相談してください。使用を続けると症状が悪化する原因となります。
 - ・つけごこちが悪いなど違和感がある場合。
 - ・装着部にケガ、骨折、傷、痛み、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常が生じた場合。

⚠注意

- 面ファスナーには硬い素材を使用しています。まれに指や肌を傷つける場合がありますので注意してください。
- 本製品は、汗や摩擦などにより色落ちや他の生地に移り染む場合があります。
- 面ファスナーが衣類につかないように装着してください。ほつれや伝線の原因となります。

【お手入れ方法】

⚠注意


- 色の薄いものと一緒に洗濯しないでください。色落ちや他の生地に移り染む場合があります。
- 他の衣類などと一緒に洗濯する場合は、洗濯ネットを使用してください。面ファスナーが他の衣類などにつくとほつれや伝線の原因となります。

- 本製品は洗濯機で洗濯できます。洗濯後は日陰で吊り干しにしてください。
- 洗濯の際は、面ファスナーを本体にとめてください。とめずに洗濯すると、面ファスナーのつきが悪くなるおそれがあります。
- アイロン、塩素系漂白剤は使用しないでください。酸素系漂白剤は使用できます。
- 乾燥機を使用しないでください。製品をいためる原因となります。
- 本製品はドライクリーニングできません。また、ウェットクリーニングはできますがタンブル乾燥は避けてください。

【装着手順】

- 装着前に本使用説明書P.2の【使用上の注意－必ずお読みください－】をよく読んでから、手順通り正しく装着してください。
- 以下の装着手順は右脚の場合です。左脚に装着する場合も同じように装着してください。


1 サポーター本体の面ファスナーをすべて取り外し、製品の下・表裏を確かめてください。

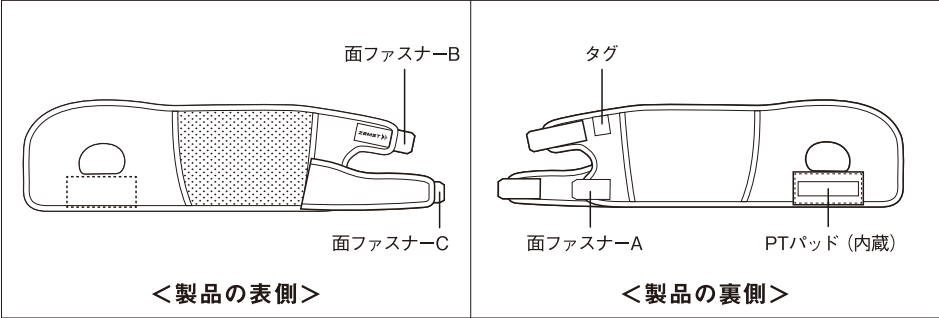

サポーター本体裏側のタグがついている方が上で、体に当てる側になります。タグの矢印の向きで上下を確認してください。


2 ヒザの前面にサポーターを当てます。

PTパッドのある側を内側にして、サポーターのヒザ穴にヒザのお皿が入るようにヒザに当てます。その際、PTパッドがヒザのお皿の下（膝蓋ジーン帯）に当たるようにしてください。

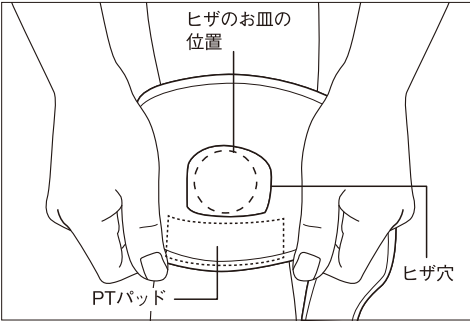


3 サポーターを引っ張りながら、面ファスナーAをとめます。

この時、PTパッドの位置がずれないように注意してください。

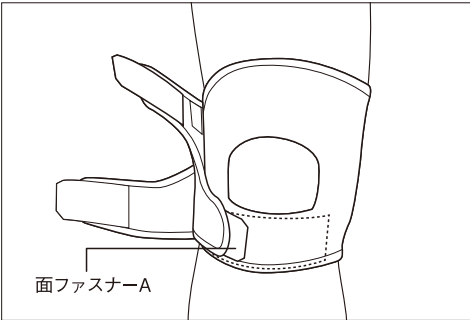


4 ヒザをまっすぐに伸ばして、面ファスナーBをとめます。

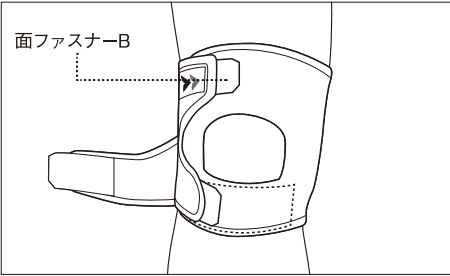

適度な圧迫になるように、面ファスナーBをとめます。


5 アンダーストラップを引っ張りながら、面ファスナーCをとめます。

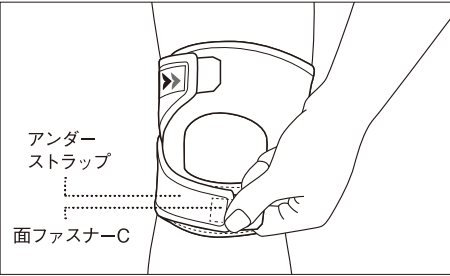

ヒザ下のPTパッドの上を通るようにアンダーストラップを引っ張りながら、面ファスナーCをとめます。

6 ヒザをまっすぐに伸ばして、サポーターを上下に引っ張り、たるみを直します。

ヒザの前だけでなく、後ろのたるみもしっかり伸ばしてください。

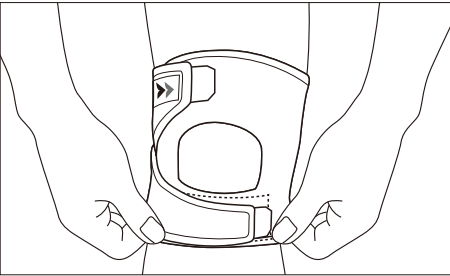

7 サポーターのゆるみやズレがないか、確かめてください。違和感がある場合は、再度、始めから装着し直してください。

