

2022.03

ザムスト ジュニア用サポーター 手首


[手首用サポーター(左右兼用)]
使用説明書

ZAMST >>

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。安全にご利用いただくために、必ずご使用前に本使用説明書をお読みください。また、本使用説明書はいつでもお読みになれるよう大切に保管してください。

【各部の名称】

※本製品は左右兼用です。図は右手に装着しています。

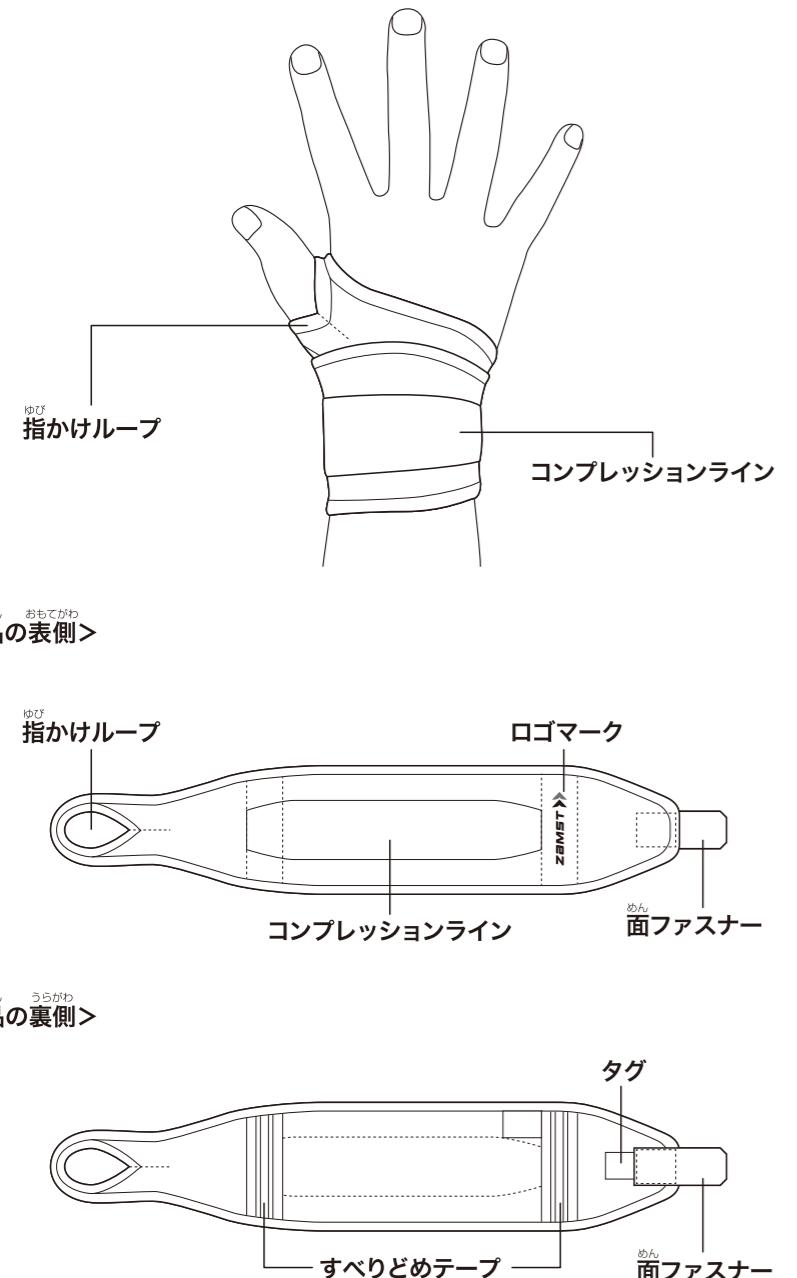

【素材】


| 素材 | |
|------|-----------------------------|
| 繊維 | ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン |
| 繊維以外 | 天然ゴム(ラテックス含む)、ポリスチレン、ポリウレタン |

※お願い: 本製品を廃棄する際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

【サイズ表】

| サイズ | 適用範囲(手首の太さ) | 製品幅 | 1箱入数 |
|-----|-------------|-----|------|
| フリー | 12cm ~ 15cm | 6cm | 1コ |

●サイズの測り方

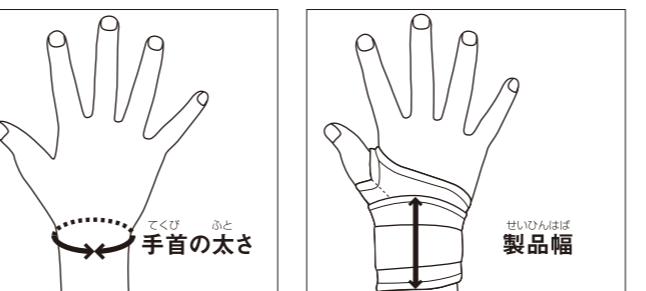

手首の太さに合わせて選んでください。
手首の太さは手首の一番細いところの太さを計測してください。



※製品の装着動画はこちらから見られます。

※製品の仕様、外観などは改良のため予告なく変更することがあります。
※製品には万全を期しておりますが、万一不良などお気づきの点がございましたら当社までご連絡ください。

日本シグマックス株式会社

〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1 お客様窓口 TEL.0800-222-7122 (通話料無料)
受付時間: 9時 ~ 17時 (平日) ※土日、祝日、年末年始を除く

ザムスト

ジュニア用サポーター

手首

[手首用サポーター(左右兼用)]

使用説明書

【用途】

●手首のサポート

【はじめにお読みください】

- 本製品は主に小学校高学年を対象にしたジュニア用サポーターです。
- 本製品は左右兼用です。
- 本製品は使用状況により、必ずしもサポートできない場合があります。
- 本製品は手首の疾患を治療できるものではありません。
- 本製品はフリーサイズです。適用範囲は本使用説明書のP.6にありますので、使用前に再度確認してください。

【ご使用にあたって】

- 素材の特性上、保管状態により変色することがあります。
- 保管の際は、面ファスナーや起毛部分に過度の重みがかからないようにしてください。
面ファスナーのつきが悪くなるおそれがあります。

【保護者の方へー必ずお読みくださいー】

本製品を使用する前に、保護者の方は本使用説明書をよくお読みいただき、お子様へご説明ください。

【使用上の注意—必ずお読みください】

本使用説明書では、安全に閲覧する事項をその危険の大きさの程度に応じて次のように分類しています。

△警告…誤った使い方をすると、人が重傷を負う可能性がある内容

△注意…誤った使い方をすると、人が軽傷を負うか、または本製品以外の他の財物に損害を与える可能性がある内容

△警告

- 異常の発生や症状の悪化を防ぐため、次の場合は使用しないでください。
 - ・アレルギー体质の方や皮膚が過敏な方。
※この製品は天然ゴムを使用しています。天然ゴムはラテックス・アレルゲンを含み、かゆみ、発赤、じんましん、むくみ、発熱、呼吸困難、ぜんそく様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こした場合には、ただちに使用を中止し、医師の診察を受けてください。
 - ・装着部に骨折、傷、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常がある場合。
 - ・手首以外の部位に使用しないでください。
 - ・就寝時は使用しないでください。
 - ・長時間装着する場合は適宜装着し直してください。長時間の圧迫などによる皮膚障害や血行障害などを起こすことがあります。
 - ・表裏を正しく使用してください。
 - ・装着手順に従って正しく使用してください。
 - ・サポーター本体をきつく締めすぎないでください。
 - ・使用中にゆるんだりずれたりしたときは、必ず手順の始めから正しく装着し直してください。
 - ・本製品に摩耗、損傷のある場合や面ファスナーのつきが悪くなった場合は使用しないでください。
 - ・本製品の加工、改造、修理を行わないでください。
- 本製品の使用中に次の異常が発生した場合、ただちに使用を中止し、医師に相談してください。使用を続けると症状が悪化する原因となります。
 - ・つけこちが悪いなど違和感がある場合。
 - ・装着部にケガ、骨折、傷、痛み、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常が生じた場合。

△注意

- 面ファスナーには硬い素材を使用しています。まれに指や肌を傷つける場合がありますので注意してください。
- 本製品は、汗や摩擦などにより色落ちや他の生地に色移りする場合があります。
- 面ファスナーが衣類につかないように装着してください。ほつれや伝線の原因となります。

【お手入れ方法】

△注意


- 色の薄いものと一緒に洗濯しないでください。色落ちや他の生地に色移りする場合があります。
- 他の衣類などと一緒に洗濯する場合は、洗濯ネットを使用してください。面ファスナーが他の衣類などにつくとほつれや伝線の原因となります。

- 本製品は洗濯機で洗濯できます。洗濯後は日陰で吊り干ししてください。
- 洗濯の際は、面ファスナーを本体にとめてください。とめずに洗濯すると、面ファスナーのつきが悪くなるおそれがあります。
- アイロン、塩素系漂白剤は使用しないでください。漂白剤は使用できます。
- 乾燥機を使用しないでください。製品をいためる原因となります。
- 本製品はドライクリーニングできません。また、ウェットクリーニングはできますがタンブル乾燥は避けてください。

【装着手順】


- 装着前に本使用説明書P.2の【使用上の注意—必ずお読みください】をよく読んでから、手順通り正しく装着してください。
- 以下の装着手順は右手の場合です。左手に装着する場合も同じように装着してください。
- 装着手順では、手の甲側から装着する手順を示していますが、手のひら側から装着する場合も同じよう装着してください。

1 サポーター本体の面ファスナーを取り外し、製品の表裏を確かめてください。

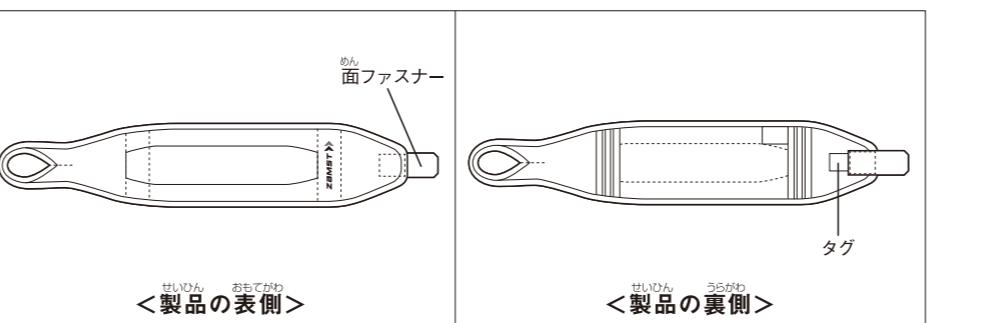


サポーター本体裏側のタグがついている方が体に当てる側になります。

2 親指に指かけループをかけます。

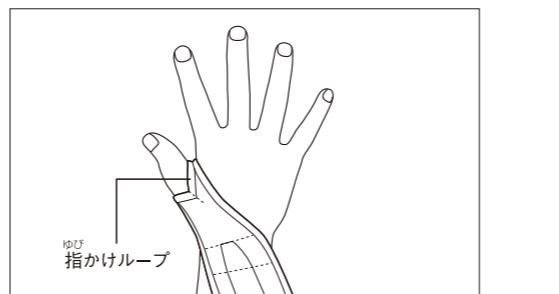

3 手を握った状態にして、サポーター本体を手の甲側から手のひら側に回し、軽く引っ張ります。

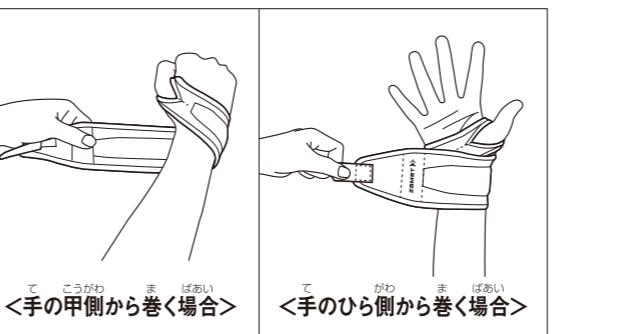

4 サポーター本体を引っ張りながら巻きつけ、面ファスナーをとめます。

適度な圧迫力になるように調節しながら、サポーター本体を巻きつけ、面ファスナーをコンプレッションラインにとめます。

5 サポーターのゆるみやズレがないか、確かめてください。違和感がある場合は、再度、始めから装着し直してください。

