

ザムスト KT

【粘着性伸縮テープ(筋肉サポート用)】

使用説明書

ZAMST

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。安全にご利用いただくために、必ずご使用前に本使用説明書をお読みください。また、本使用説明書はいつでもお読みになれるよう大切に保管してください。

【用途】

- 筋肉のサポート
- 関節・筋の圧迫と固定

【品質表示】

素材		
基材：綿、ポリウレタン	粘着材：アクリル系糊	剥離紙：紙

※お願い：本製品を廃棄する際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

【製品規格】

製品規格(幅×長さ)	品番	1箱入数
38mm×5.0m	308701	2巻
50mm×5.0m	308702	1巻
75mm×5.0m	308703	1巻

※長さは実長です。

【ご使用にあたって】

- 高温・多湿・直射日光にあたる場所をさけ、お子様の手の届かないところに保管してください。
- 使用後は、片手で本製品を押さえて、側縁からゆっくりはがすと糊がきれいにはがれます。

【使用上の注意－必ずお読みください－】

本使用説明書では、安全に関わる注意事項をその危険の大きさの程度に応じて次のように分類しています。

- ⚠️ **警告**…誤った使い方をすると、人が重傷を負う可能性がある内容
- ⚠️ **注意**…誤った使い方をすると、人が軽傷を負うか、または本製品以外の他の財物に損害を与える可能性がある内容

⚠️ 警告

- 異常の発生や症状の悪化を防ぐため、次の場合は使用しないでください。
 - ・アレルギー体質の方や肌が過敏な方。
 - ・装着部に骨折、傷、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常がある場合。
- 次のことを必ず守って正しく使用してください。正しく使用しないと、血行障害や負傷事故の原因となります。
 - ・長時間貼付したり、急激にはがさないでください。皮膚刺激の原因となります。
 - ・本製品を強く引っぱりすぎたり、締めつけすぎないでください。
- 本製品の使用中に次の異常が発生したら、ただちに使用を中止し、医師の診断と手当てを受けてください。使用を続けると、症状が悪化する原因となります。
 - ・装着部にケガ、骨折、傷、痛み、しびれ、腫れ、湿疹、発疹、発赤、かゆみ、かぶれなどの異常が生じた場合。

※製品の仕様、外観等は改良のため予告なく変更することがあります。

※製品には万全を期しておりますが、万一不良等お気づきの点がございましたら当社までご連絡ください。



〒163-6033 東京都新宿区西新宿6-8-1 TEL.03(5326)3220

本使用説明書は古紙を含む再生紙に植物性の大豆油インキで印刷しています。

パッケージを廃棄する際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

パッケージ本体：段ボール（古紙配合率90%）／フック：プラスチック（PP）



2009.07（改版）
168382