



ザムスト


コールド&ホットパック

【冷やして使用する場合】

- 冷凍庫内に水平に置き、6～8時間程度冷却してください。
- 肌に直接触れないように、必ずタオルなどで巻いて使用してください。
- 冷却持続時間は約1時間(自社測定値)です。ただし、外部環境や使用条件により異なります。
- 冷凍庫に長時間入れたままにしておくと、まれに凍結して固くなることがあります。その場合は、しばらく室温に放置してから使用してください。

【温めて使用する場合】

本製品は時間経過とともに内容物から水分が蒸発します。下記の加熱時間の目安は製造直後の製品での目安です。内容物から水分が減った製品は目安時間よりも短い時間で膨らみ、加熱を続けると破裂するおそれがありますので、状態を見ながら加熱してください。

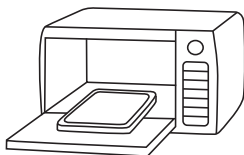

- ① 電子レンジ皿など製品が触れる部分の汚れをよく拭き取ってから使用してください(汚れと触れた部分が溶けるおそれがあります。)



- ② 本体の両端を持って電子レンジから取り出し、タオルなどで巻いて使用してください。

- ※ 温かさが足りない場合は、中の様子を見ながら10秒ずつ再加熱してください。(加熱中、製品が丸く膨らんできたら電子レンジのスイッチを速やかに切ってください)
- ※ 700W以上の電子レンジの場合は、加熱時間を短くしてください。
- ※ 業務用電子レンジでは加熱しないでください。

【加熱上の注意】

- 加熱時間を誤ると製品が破裂するおそれがありますので、必ず加熱時間を守り、表示以上の連続加熱をしないでください。
- 必ず電子レンジ機能で時間を設定し加熱してください。オート加熱、おまかせ加熱は絶対に行わないでください。
- 加熱中に製品が破裂した場合は、電子レンジのスイッチを切り、冷却したことを確認した上で、速やかに処分してください。(中のゲルが電子レンジ皿などに漏れた時は、布などで拭き取ってください。)

標準加熱時間の目安

600W	1分30秒
500W	2分

※ ご使用の電子レンジによって加熱時間が変わります。

【警告】

- 本製品は食べられません。
- 本製品を冷凍庫から取り出した直後に電子レンジで加熱しないでください。
- 本製品を使用する際は、肌に直接触れないように、必ずタオルなどで巻いてから使用してください。
- 同じ部位に長時間当てていると、凍傷や低温やけどのおそれがありますので注意してください。
- 糖尿病など、温感・冷感及び知覚障害のある方は、凍傷ややけどのおそれがありますので医師に相談してください。
- 万一、中身が皮膚に付着したり、目に入った場合はぬるま湯でよく洗ってください。異常がある場合は医師に相談してください。

【注意】

- 衣類と直接擦れると、色移りする場合があります。本製品を衣類に直接当てないでください。
- お子様が使用する場合は、保護者の目の届くところで十分に注意してください。
- 本製品を落としたり、硬いもの、とがったものにぶつけたり、本製品の上で飛び跳ねたりすると破れるおそれがありますので注意してください。
- 破損の原因となる場合がありますので、二つ折りにして使用しないでください。
- 中身が漏れて衣類などに付着した場合は、まず布などで拭き取り、その後よく水洗いしてください。
- お子様の手の届くところ、高温多湿、直射日光の当たる所は避けて保存してください。
- 製品が薄くなったり、常温でも固くなってきたり、袋が破れた場合は、使用を中止し速やかに処分してください。

【お手入れと廃棄方法】

- 本製品の表面が汚れた際は、水でていねいに洗い流し、日陰で干してください。
- 処分する際は、内容物は生ゴミとして、外装はプラスチックゴミとして各地方自治体の指示に従って捨ててください。

素材

外装：ナイロン、PVC
内容物：水、ポリプロピレングリコール、
メチルセルロース、着色料

※製品の仕様、外観等は改良のため、予告なく変更することがあります。
※製品には万全を期しておりますが、万一不良等お気づきの点がございましたら
当社までご連絡ください。

MADE IN TAIWAN

 **SIGMAX** 日本シグマックス株式会社

本社：〒163-6033 東京都新宿区西新宿 6-8-1

TEL.0800-222-7122 (通話料無料)

受付時間：9時～17時(平日) ※土日、祝日、年末年始を除く

ZAMST 

www.zamst.jp