

# 使用説明書

## 【装着手順】

- 装着前に本使用説明書の【使用上の注意—必ずお読みください—】をよく読んでから、手順通り正しく装着してください。
- 以下の装着手順は左手指(中指)の場合です。その他の指や右手指に装着する場合も同じように装着してください。

①サポーター本体の筒状の部分をサポートしたい指に通します。このとき一緒に巻く指のある側にサポーター本体の残りの部分(ストラップ部分)がくる向きで通します。

※小指をサポートしたい場合は、薬指に筒状の部分を通してください。

②サポーター本体のストラップ部分を上記2本の指に巻きつけ、面ファスナーを本体にとめます。

※一緒に巻く指によってはロゴ位置が逆になる場合があります。



※左手の中指と人差し指を固定する場合

面ファスナーを持って引っ張り、それぞれ本体にとめます。このとき、面ファスナーを上から押さえて、しっかりとめてください。

## 【用途】

- 手指(親指以外)のサポート

### 【はじめにお読みください】

- 本製品は左右兼用です。
- 本製品は使用状況により、必ずしもサポートできない場合があります。
- 本製品は手指の疾患を治療できるものではありません。
- 使用前にサイズが合っているか再度確認してください。サイズ表は台紙の裏面にあります。

### 【ご使用にあたって】

- 素材の特性上、保管状態により変色することがあります。
- 保管の際は、面ファスナーや起毛部分に過度の重みがかからないようにしてください。面ファスナーのつきが悪くなるおそれがあります。

### 【使用上の注意—必ずお読みください—】

本使用説明書では、安全に関わる注意事項をその危険の大きさの程度に応じて次のように分類しています。

△警告……誤った使い方をすると、人が重傷を負う可能性がある内容

△注意……誤った使い方をすると、人が軽傷を負うか、または本製品以外の他の財物に損害を与える可能性がある内容

### ▲ 警告

- 異常の発生や症状の悪化を防ぐため、次の場合は使用しないでください。
  - ・アレルギー体質の方や皮膚が過敏な方。
  - ・装着部に骨折、傷、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常がある場合。
- 次のことを必ず守って正しく使用してください。正しく使用しないと、血行障害や負傷事故の原因となります。
  - ・手指以外の部位に使用しないでください。
  - ・サイズの合った製品を使用してください(サイズ表は台紙の裏面にあります)。
  - ・就寝時は使用しないでください。
  - ・長時間装着する場合は適宜装着し直してください。長時間の圧迫などによる皮膚障害や血行障害などを起こすおそれがあります。
  - ・表裏、前後を正しく使用してください。
  - ・装着手順に従って正しく使用してください。
  - ・サポーター本体をきつく締めすぎないでください。
- ・使用中にゆるんだりずれたりしたときは、必ず手順の始めから正しく装着し直してください。
- ・本製品に摩擦、損傷のある場合や面ファスナーのつきが悪くなった場合は使用しないでください。
- ・本製品の加工、改造、修理を行わないでください。
- 本製品の使用中に次の異常が発生した場合、ただちに使用を中止し、医師に相談してください。使用を続けると症状が悪化する原因となります。
  - ・つけごちが悪いなど違和感がある場合。
  - ・装着部にケガ、骨折、傷、痛み、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常が生じた場合。

### ▲ 注意

- 面ファスナーには硬い素材を使用しています。まれに指や肌を傷つける場合がありますので注意してください。
- 本製品は、肌に直接装着してください。衣類などの上に重ねて装着しないでください。
- 本製品は、汗や摩擦などにより色落ちや他の生地の色移りする場合があります。
- 面ファスナーが衣類につかないように装着してください。ほつれや伝線の原因となります。

## 【お手入れ方法】

### ▲ 注意

- 色の薄いものと一緒に洗濯しないでください。色落ちや他の生地の色移りする場合があります。
- 他の衣類などと一緒に洗濯する場合は、洗濯ネットを使用してください。面ファスナーが他の衣類などにつくとほつれや伝線の原因となります。

- 本製品は洗濯機で洗濯できます。洗濯後は日陰で吊り干しにしてください。
- 洗濯の際は、面ファスナーを本体にとめてください。とめずに洗濯すると、面ファスナーのつきが悪くなるおそれがあります。
- アイロン、塩素系漂白剤は使用しないでください。酸素系漂白剤は使用できます。
- 乾燥機は使用しないでください。製品をいためる原因となります。
- 本製品はドライクリーニングできません。また、ウェットクリーニングはできますがタンブル乾燥は避けてください。



●本製品はドライクリーニングできません。また、ウェットクリーニングはできますがタンブル乾燥は避けてください。