


③ 首にかけ、カバーの穴にシリコンケースのふたを通して装着してください。

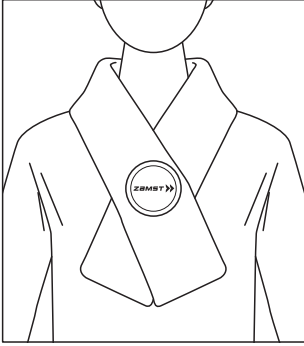

【サイズ表】

サイズ	適用範囲 (首まわり)	入り数
フリー	~40cm	1個

※お願い:本製品を廃棄する際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。
 ※製品の仕様、外観などは改良のため予告なく変更することがあります。
 ※製品には万全を期しておりますが、万一不良などお気づきの点がございましたら当社までご連絡ください。

WEB
アンケート
ご協力の
お願い

ご回答くださった方の中から抽選で毎月30名様に
ザムストオリジナルグッズをプレゼントします。

※回答は1製品につき、1回のみとなります。重複して回答された場合、
プレゼント応募は無効となります。
※パッケージのバーコードに記載した番号が必要となります。



日本シグマックス株式会社

〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1 お客様窓口:TEL.0800-222-7122 (通話料無料)
 受付時間:9時~17時(平日) ※土日、祝日、年末年始を除く

ザムスト アイスバッグ 首用 [氷のう] 使用説明書

ZAMST

安全にご使用いただくために、必ず
ご使用前に本使用説明書をお読み
ください。またいつでもお読みにな
れるよう保管してください。

はじめにお読みください

- 本製品は使用状況によって、冷却できない場合があります。
- 本製品は治療用の製品ではありません。

ご使用にあたって

- 素材の特性上、保管状態により変色することがあります。
- 高温になる場所に置かないでください。変形、劣化を引き起こすことがあります。
- 結露により、衣類や冷却部分が濡れることがあります。


【使用上の注意—必ずお読みください—】

本使用説明書では、安全に関わる注意事項をその危険の大きさの程度に応じて次のように分類しています。



警告

誤った使い方をすると、人が重傷を負う可能性がある内容

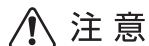

注意

誤った使い方をすると、人が軽傷を負うか、または本製品以外の他の財物に損害を与える可能性がある内容

警告

- 異常の発生や症状の悪化を防ぐため、次の場合は使用しないでください。
 - ・アレルギー体質の方や皮膚が過敏な方。
 - ・高血圧、心臓病などの血行障害のある方、神経障害、糖尿病などで血行障害に気付きにくい方。
 - ・装着部に傷、しびれ、湿疹などの異常がある場合。
- 次のことを必ず守って正しく使用してください。正しく使用しないと、血行障害や負傷事故の原因となります。
 - ・冷却以外の用途で使用しないでください。
 - ・アイスバッグの中に氷または水以外のもの(熱湯やドライアイス、水以外の液体など)を入れてください。
 - ・就寝時は使用しないでください。
 - ・装着手順に従って正しく使用してください。
 - ・使用中にゆるんだりずれたりした場合は、正しく装着し直してください。また、長時間使用する場合は、過度の圧迫などに注意し、適宜装着し直してください。
 - ・本製品が摩耗、損傷した場合は使用しないでください。
 - ・本製品の加工、改造、修理を行わないでください。
- 本製品の使用中、ケガ、痛み、しびれ、湿疹などの異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し、医師に相談してください。使用を続けると症状が悪化する原因となります。

注意

- 本製品は、汗や摩擦などにより色落ちや他の生地に色移りする場合があります。
- 本体ごと冷凍すると破損や破裂のおそれがあります。
- 氷のみで使用すると破損や破裂のおそれがあります。
- 鋭利なものに触れると破損や破裂のおそれがあります。

【お手入れ方法】


警告

- 抜いたシリコンケースを再度入れ直すときは、鋭利なもので触れないでください。破損や破裂の原因となります


注意

- 色の薄いものと一緒に洗濯しないでください。色落ちや他の生地に色移りする場合があります。
- 使用後は水を切り、乾燥させてから保管してください。カビやにおい発生の原因となります。

- 本製品はカバーのみ洗濯機で洗えます。洗濯後は日陰で吊り干しにしてください。
- 洗濯の際はシリコンケースを抜いてください。
- アイロン、塩素系漂白剤は使用しないでください。酸素系漂白剤は使用できません。
- 乾燥機は使用しないでください。製品をいためる原因となります。
- 本製品のカバーはドライクリーニングできません。また、ウェットクリーニングはできますがタンブル乾燥は避けてください。
- ふたの内側にあるシートを外さないでください。水が漏れるおそれがあります。

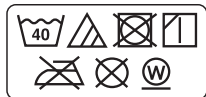


【各部の名称】

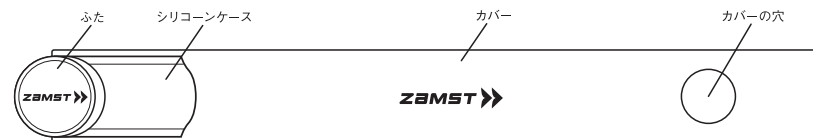

【装着手順】

- 装着前に本使用説明書【使用上の注意—必ずお読みください—】をよく読んでから、手順通り正しく装着してください。

- 1 シリコンケースに氷を3/4程度と、少量の水を入れてください。
*角がとがった氷を中に入れると、内側のシリコンケースに傷つき、水もれを起こすおそれがあります。氷は砕くか、少量の水を入れて表面を滑らかにした上で使用してください。

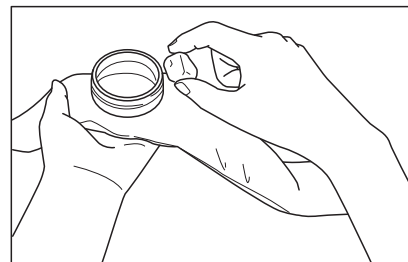

- 2 シリコンケースの中の空気をできるだけ抜いて、ふたをしっかり閉めてください。
*水や氷を入れた後、ふたをしっかり閉めてください。使用中にふたが外れて中の水や氷が漏れ、衣類や身体が濡れるおそれがあります。

