

はじめにお読みください

・本製品は使用状況によって、冷却できない場合があります。

【ご使用にあたって】

- ・素材の特性上、保管状態により変色することがあります。
- ・結露により、衣類や冷却部分が濡れることがあります。
- ・首がしまることを防止するため、安全パーツに強い力がかかるとひもが外れます。

【使用上の注意-必ずお読みください】

本使用説明書では、安全に関わる注意事項をその危険の大きさの程度に応じて次のように分類しています。

△警告……誤った使い方をすると、人が重傷を負う可能性がある内容

△注意……誤った使い方をすると、人が軽傷を負うか、または本製品以外の他の財物に損害を与える可能性がある内容

△警告

●異常の発生や症状の悪化を防ぐため、次の場合は使用しないでください。

- ・アレルギー体質の方や皮膚が過敏な方。
- ・装着部に傷、しびれ、湿疹などの異常がある場合。
- ・レイノー病（症候群）、その他の血液痙攣性疾患、冷えに対する過敏症、局所の血液循環不良、神経障害のある方。

●次のことを必ず守って正しく使用してください。正しく使用しないと、血行障害や負傷事故の原因となります。

- ・本製品は食べられません。
- ・冷却以外の用途で使用しないでください。
- ・就寝時は使用しないでください。
- ・使用方法に従って正しく使用してください。
- ・長時間冷却する場合は、血行障害や凍傷のおそれがありますので、注意してください。
- ・本製品に摩耗、損傷、液漏れがある場合は使用しないでください。
- ・本製品の加工、改造、修理を行わないでください。

●本製品の使用中に、ケガ、骨折、痛み、しびれ、腫れ、湿疹などの異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し、医師に相談してください。使用を続けると症状が悪化する原因となります。

●中身が皮膚に付着した場合や目に入った場合は水でよく洗ってください。異常がある場合は医師に相談してください。

△注意

- ・本製品を落としたり、硬いもの、とがったものにぶついたりすると、破れるおそれがありますので注意してください。
- ・保冷剤の中身が漏れて衣類などに付着した場合は、まず布などで拭き取り、その後よく水洗いしてください。
- ・お子様の手の届く所を避けて保存してください。
- ・製品が変形、破損、液漏れした場合は直ちに使用を中止してください。
- ・高温になる場所に置かないでください。変形、劣化を引き起こすことがあります。

【使用方法】

①保冷剤を水平に置き、冷凍庫で6時間程度冷やします。

②保冷剤を付属カバーに入れます。この際、付属カバーのファスナー側にアルミシート面がくるようにしてください。

〈図A〉

③カバーのファスナーと反対側の面を首にあて〈図B〉、首の前でひもの長さを調節します。



〈図A〉



〈図B〉

【お手入れ方法と廃棄方法】

・保冷剤が汚れた時は、軽く水洗いしてください。

・保冷剤の内容物は生ゴミとして、カバーおよび保冷剤の外装は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

・カバーは色の薄いものと一緒に洗濯しないでください。色落ちや他の生地に色移りする場合があります。

・カバーを他の衣類などと一緒に洗濯する場合は、洗濯ネットを使用してください。また、洗濯の際は保冷剤を抜いてください。

〈カバー生地〉



※製品の仕様、外観などは改良のため予告なく変更することがあります。

※製品には万全を期しておりますが、万一不良などお気づきの点がございましたら当社までご連絡ください。

【素材】

●カバー

・織 維: ポリエステル

・繊維以外: ナイロン、ポリエチレン

●保冷剤

・外 装: アルミシート、ポリオレフィンフィルム

・内容物: 水、増粘剤

【原産国】

日本

【製造元】

ゴムノイナキ株式会社

【販売元】

日本シグマックス株式会社

〒163-6033 東京都新宿区西新宿6-8-1

【お客様窓口】TEL.0800-222-7122(通話料無料)

【受付時間】9時～17時(平日) ※土日、祝日、年末年始を除く



: 外装、内袋

2022.02(作成)