

# はじめにお読みください

本製品は使用状況によって、保冷できない場合があります。

【ご使用に当たって】・素材の特性上、保管状態により容器が変色することがあります。・冷凍時には凍結膨張により容器が膨らむことがあります。・繰り返しのご使用で内容物の色落ち・粘度低下が出る場合があります。

【使用上の注意—必ずお読みください—】本使用説明書では、安全に関わる注意事項をその危険の大きさの程度に応じて次のように分類しています。

△警告……誤った使い方をすると、人が重傷を負う可能性がある内容

△注意……誤った使い方をすると、人が軽傷を負うか、または本製品以外の他の財物に損害を与える可能性がある内容

△警告 ●次のことを必ず守って正しく使用してください。正しく使用しないと、負傷事故の原因となります。・本製品は食べられません。・保冷以外の用途で使用しないでください。・直接、地肌に長時間当てないでください。・乳幼児の手の届かない場所で使用、保管してください。・本製品に損傷、液漏れがある場合は使用しないでください。・本製品の加工、改造、修理を行わないでください。●中身が皮膚に付着した場合や目に入った場合は水でよく洗ってください。異常がある場合は医師に相談してください。

△注意 ・落したり、硬いもの、とがったものにぶついたりすると、破損のおそれがありますので注意してください。・製品の中身が漏れて衣類などに付着した場合は、まず布などで拭き取り、その後よく洗い流してください。・高温になる場所に置かないでください。変形、劣化を引き起こすことがあります。・凍結庫の温度が-40℃よりも低い凍結庫を使用しないでください。容器の破損、内容物の漏れが発生する恐れがあります。

【ご使用方法】・本製品を冷凍庫で完全に凍結させてください。※凍結時間は冷凍庫の性能、条件により異なります。・固体化が確認できたらクーラーボックス等に入れてご使用ください。

WEB  
アンケート  
ご協力の  
お願い

ご回答くださった方の中から抽選で毎月30名様に  
ザムストオリジナルグッズをプレゼントします。

※回答は1製品につき、1回のみとなります。重複して回答された場合、プレゼント応募は無効となります。※パッケージのバーコードに記載した番号が必要になります。



日本シグマックス株式会社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1

【お客様窓口】TEL.0800-222-7122(通話料無料)

【受付時間】9時～17時(平日)※土日、祝日、年末年始を除く

2023.05(作成) 169601