
### 【お手入れ方法】

# <u>(1)</u>注意

色の薄いものと一緒に洗濯しないでください。色落ちや他の生地に色移りする場合 があります。

- ●本製品は手洗いで洗濯できます。ていねいに押し洗いし、絞らないようにタオルなどで水気を取り、日陰で 吊り干しにしてください。
- ●洗濯の際は、面ファスナーを本体にとめてください。とめずに洗濯すると、面ファスナーのつきが悪くなるおそれがあります。
- ●アイロン、塩素系漂白剤・酸素系漂白剤は使用しないでください。製品をいためる原因となります。
- ●タンブル乾燥は行わないでください。製品をいためる原因となります。
- ●本製品はドライクリーニングもウェットクリーニングもできません。

### 【各部の名称】

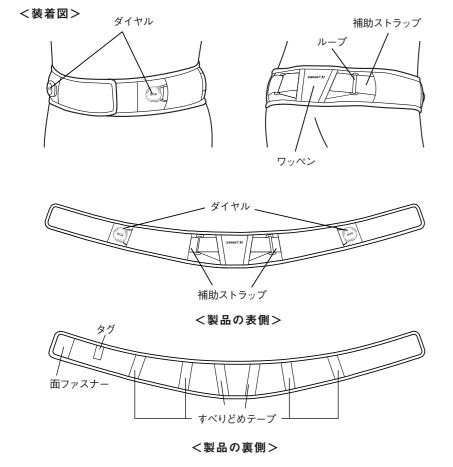

### 【素材】

素材		
繊維	ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン	
繊維以外	クロロプレンゴム、ポリカーボネート、ポリアセタール、 ナイロン、TPC、ガラス繊維入りナイロン、 ガラス繊維入りポリアセタール、ステンレス	

※お願い:本製品を廃棄する際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。


### 【サイズ表】

サイズ	適用範囲(腰回り)	1箱入数
S	75cm ~ 83cm	
M	83cm ~ 91cm	1 🗆
L	91cm ~ 99cm	
LL	99cm ~ 107cm	

### ●サイズの選び方

腰回りに合わせて選んでください。腰回りは腸骨(腰骨)の出ている部分を目安に計測してください(右図参照)。

計測値が2サイズのさかいになった場合は、大きい方のサイズを 選んでください。

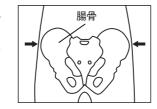



※製品の装着動画はこちらから見られます。

※製品の仕様、外観などは改良のため予告なく変更することがあります。 ※製品には万全を期しておりますが、万一不良などお気づきの点がございましたら当社までご連絡ください。

## 日本シグマックス株式会社

〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1 お客様窓口 TEL.0800-222-7122 (通話料無料) 受付時間: 9時~17時 (平日) ※土日、祝日、年末年始を除く 2022.03

# ザムスト

# Pelvilock

ペルヴィロック ダイヤルタイプ [骨盤用サポーター]

# 使用説明書



このたびは本製品をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。安全にご利用いただくために、必ずご使用前に本使用説明書をお読みください。また、本使用説明書はいつでもお読みになれるよう大切に保管してください。

### 【用途】

●骨盤のサポート

### 【はじめにお読みください】

- ●本製品は使用状況により、必ずしもサポートできない場合があります。
- ●本製品は骨盤の疾患を治療できるものではありません。
- ●使用前にサイズが合っているか再度確認してください。サイズ表は本使用説明書のP.6にあります。

### 【ご使用にあたって】

- ●本体裏側のメッシュ生地に面ファスナーをつけないでください。メッシュ生地をいためる原因となります。
- ●素材の特性上、保管状態により変色することがあります。
- ●保管の際は、面ファスナーや起毛部分に過度の重みがかからないようにしてください。面ファスナーのつきが悪くなるおそれがあります。

168865 *6* 

### 【使用上の注意-必ずお読みください-】

本使用説明書では、安全に関わる注意事項をその危険の大きさの程度に応じて次のように分類しています。 ⚠警告…誤った使い方をすると、人が重傷を負う可能性がある内容

⚠注意…誤った使い方をすると、人が軽傷を負うか、または本製品以外の他の財物に損害を与える可能性がある内容

- ●異常の発生や症状の悪化を防ぐため、次の場合は使用しないでください。
- ・アレルギー体質の方や皮膚が過敏な方。
- ・装着部に骨折、傷、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常がある場合。
- ●次のことを必ず守って正しく使用してください。正しく使用しないと、血行障害や負傷 事故の原因となります。
- ・骨盤以外の部位に使用しないでください。
- ・サイズの合った製品を使用してください(サイズ表は本使用説明書のP.6にあります)。
- ・妊娠中または妊娠していると思われる場合は、医師に相談してください。
- 就寝時は使用しないでください。
- ・長時間装着する場合は適宜装着し直してください。長時間の圧迫などによる皮膚障害 や血行障害などを起こすおそれがあります。
- ・上下、表裏、前後を正しく使用してください。
- ・装着手順に従って正しく使用してください。

#### **企業告**

- ・サポーター本体やストラップをきつく締めすぎないでください。
- ・使用中にゆるんだりずれたりしたときは、必ず手順の始めから正しく装着し直してくだ
- ・本製品に摩耗、損傷のある場合や面ファスナーのつきが悪くなった場合は使用しないでく
- ・本製品の加工、改造、修理を行わないでください。
- ●本製品のダイヤルおよびループはプラスチック製です。負傷事故を防ぐため、次の場 合は使用しないでください。
- ・本製品との接触により、他人を傷つけることが予想される場合。
- ・転倒、硬いものへの接触が予想される場合。
- ●本製品の使用中に次の異常が発生した場合、ただちに使用を中止し、医師に相談してく ださい。使用を続けると症状が悪化する原因となります。
- ・つけごこちが悪いなど違和感がある場合。
- ・装着部にケガ、骨折、傷、痛み、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常が生じた場合。


### **注意**

●面ファスナーには硬い素材を使用しています。まれに指や肌を傷つける場合がありますの で注意してください。

- ●本製品は、必ず肌着や衣類の上から装着し、肌に直接当てないでください。
- ●本製品は、汗や摩擦などにより色落ちや他の生地に色移りする場合があります。
- ●面ファスナーが衣類につかないように装着してください。ほつれや伝線の原因となります。
- ●転倒や硬いものとの接触に注意してください。ダイヤルが破損するおそれがあります。


### 【装着手順】

- ●装着前に本使用説明書P.2~3の【使用上の注意-必ずお読みくださいー】をよく読んでから、手 順通り正しく装着してください。
- サポーター本体の面ファスナーを取り外し、製品の上下・表裏・前後を確かめてください。

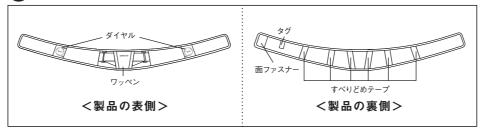


サポーター本体裏側のタグがついている方が上で、体に当てる側になります。タグの矢印の向きで上 下を確認してください。


**2** 左右のダイヤルを垂直方向にカチッと音がするまで引っ張り、ロックを解除します。

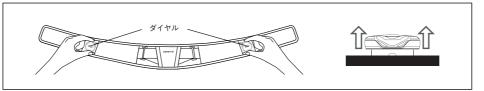

サポーターの両端を持って引っ張り、補助ストラップをゆるめます。

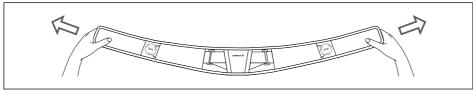


4 骨盤部分にサポーターを当てます。

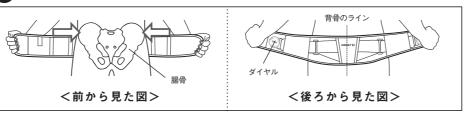


製品表中央にあるワッペンの中心が背骨のラインにくるように当ててください。 イラストのように陽骨(腰骨)の出ている部分よりも下に装着します。

■ サポーター本体で骨盤部を覆い、 体の正面で面ファスナーをとめます。

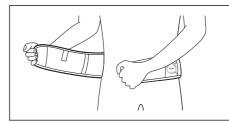


本体両端部を引っ張りながら、体の正面で面ファカチッと音がします。 スナーをとめます。

### **合** 左右のダイヤルを押し込み、 ロックします。

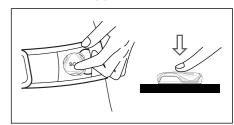

左右のダイヤルをそれぞれ回し、補助ストラップを締めます。

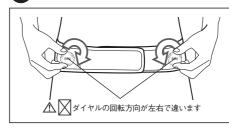

ダイヤルは矢印の方向に回してください。締めす ぎてしまったときには再度ダイヤルのロックを解 除し、補助ストラップをゆるめてから手順の⑥に 戻り、締め直してください。

★記 サポーターのゆるみやズレがないか、確かめてください。 違和感がある場合は、再度、始めから装着し直してください。

