

④ 背中側のジョイントパーツを、わきの下を通して正面にまわし、適度な圧迫になるように胸の上で面ファスナーBをとめます。ジョイントパーツの中心がわきの部分になるようにジョイントパーツの取り付け位置を調節してください。
※左肩に装着する場合は胸の上で面ファスナーAをとめます。


⑥ サポーターを上下に引っ張り、たるみを直します。

⑦ サポーターのゆるみやズレがないか、確かめてください。違和感がある場合は、再度、始めから装着し直してください。

【サイズ表】

サイズ	適用範囲(腕のつけ根の太さ)	1箱入数
M	34cm～41cm	1コ
L	41cm～48cm	
LL	48cm～55cm	

●サイズの選び方

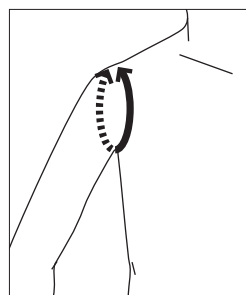

腕のつけ根の太さに合わせて選んでください。腕のつけ根の太さは、肩の出っ張りとかわきの下を通る太さを計測してください。計測値が2サイズのさかいになった場合は、大きい方のサイズを選んでください。

※製品の装着動画はこちらから見られます。



※お願い: 本製品を廃棄する際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

※製品の仕様、外観などは改良のため予告なく変更することがあります。

※製品には万全を期しておりますが、万が一不良などお気づきの点がございましたら当社までご連絡ください。

日本シグマックス株式会社

〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1 お客様窓口: TEL.0800-222-7122 (通話料無料)

受付時間: 9時～17時(平日) ※土日、祝日、年末年始を除く

2022.03

ザムスト

ショルダーラップ[®]

[肩用サポーター]

使用説明書

ZAMST ➤

安全にご使用いただくために、必ず
ご使用前に本使用説明書をお読み
ください。またいつでもお読みにな
れるよう保管してください。

はじめにお読みください

- 本製品は左右兼用です。
- 本製品は使用状況によって、サポートできない場合があります。
- 本製品は治療用の製品ではありません。

ご使用にあたって

- 素材の特性上、保管状態により変色することがあります。
- 保管の際は、製品を強く押しつぶさないようにしてください。面ファスナーのつきが悪くなるおそれがあります。

2022.03
168371

【使用上の注意—必ずお読みください—】

本使用説明書では、安全に関わる注意事項をその危険の大きさの程度に応じて次のように分類しています。



警告

誤った使い方をすると、人が重傷を負う可能性がある内容



注意

誤った使い方をすると、人が軽傷を負うか、または本製品以外の他の財物に損害を与える可能性がある内容



警告

- 異常の発生や症状の悪化を防ぐため、次の場合は使用しないでください。
 - ・アレルギー体質の方や皮膚が過敏な方。
 - ・装着部に骨折、傷、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常がある場合。
- 次のことを必ず守って正しく使用してください。正しく使用しないと、血行障害や負傷事故の原因となります。
 - ・肩以外の部位に使用しないでください。
 - ・サイズの合った製品を使用してください。
 - ・妊娠中または妊娠していると思われる場合は、医師に相談してください。
 - ・就寝時は使用しないでください。
 - ・装着手順に従って正しく使用してください。
 - ・サポーター本体をきつく締めすぎないでください。
 - ・使用中にゆるんだりずれたりした場合は、正しく装着し直してください。また、長時間使用する場合は、過度の圧迫などに注意し、適宜装着し直してください。
 - ・本製品が摩耗、損傷した場合や面ファスナーのつきが悪くなった場合は使用しないでください。
 - ・本製品の加工、改造、修理を行わないでください。
- 本製品の使用中に、ケガ、骨折、痛み、しびれ、腫れ、湿疹などの異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し、医師に相談してください。使用を続けると症状が悪化する原因となります。



注意

- 面ファスナーには硬い素材を使用しています。まれに指や肌を傷つける場合がありますので注意してください。
- 本製品は、必ず肌着や衣類の上から装着し、肌に直接当てないでください。
- 本製品は、汗や摩擦などにより色落ちや他の生地の色移りする場合があります。
- 面ファスナーが衣類につかないように装着してください。ほつれや伝線の原因となります。

【お手入れ方法】



注意

- 色の薄いものと一緒に洗濯しないでください。色落ちや他の生地の色移りする場合があります。
- 他の衣類などと一緒に洗濯する場合は、ほつれや伝線为了避免のため、洗濯ネットを使用してください。

- 本製品は洗濯機で洗えます。洗濯後は日陰で吊り干しにしてください。
- 面ファスナーをとめて洗濯してください。とめずに洗濯すると、面ファスナーのつきが悪くなるおそれがあります。
- アイロン、塩素系漂白剤は使用しないでください。酸素系漂白剤は使用できます。
- 乾燥機は使用しないでください。製品をいためる原因となります。
- 本製品はドライクリーニングできません。また、ウェットクリーニングはできますがタンブル乾燥は避けてください。

【各部の名称】 ※図は右肩に装着しています。

ロゴマーク

ジョイントパーツ

- 【装着手順】
- 装着前に本使用説明書 P.2 の【使用上の注意—必ずお読みください—】をよく読んでから、手順通り正しく装着してください。
 - 以下の装着手順は右肩の場合です。

面ファスナーC

面ファスナーB

タグ

面ファスナーA

ジョイントパーツ

<製品の表側>

<製品の裏側>

- ① サポーター本体の面ファスナーをすべて取り外し、製品の向きを確かめてください。
サポーター本体裏側のタグがついている方が上で、体に当てる側になります。
ジョイントパーツは青い生地が裏で、体に当てる側になります。

タグ

- ② サポーター本体の面ファスナーA(タグがついている方)にジョイントパーツを取りつけます。
※左肩に装着する場合は、面ファスナーBにジョイントパーツを取りつけます。

- ③ サポーター本体の穴の部分が肩の出っ張り付近にくるように引き上げます。