


【取り外し手順】

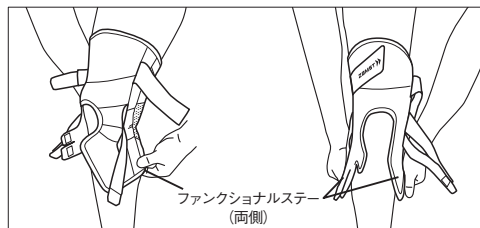

<注意>


- ①面ファスナーをすべて取り外します。
 - ②両側のファンクショナルステーの下端を持ち、下に引っ張りながら製品を外してください。
- ※製品を裏返して外さないようにしてください。ファンクショナルステーが破損する原因となります。

【サイズ表】 ゴムスト ZK-PROTECT

サイズ	適用範囲(太ももの太さ)	1箱入数
S	36cm~40cm	1コ
M	40cm~44cm	
L	44cm~48cm	
LL	48cm~52cm	
3L	52cm~56cm	
4L	56cm~62cm	
5L	62cm~68cm	

※4L・5Lサイズは、ゴムストオンラインショップ限定商品となります。

●サイズの選び方

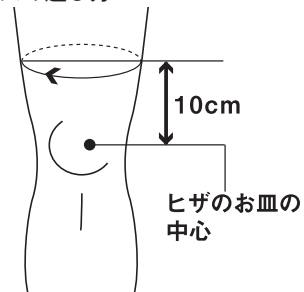

太ももの太さに合わせて選んでください。太ももの太さは、普通に立った状態でヒザのお皿(膝蓋骨)の中心から10cm上の太さを計測してください。計測値が2サイズのさかいになった場合は、大きい方のサイズを選んでください。両脚に装着する場合は、左右の太さをそれぞれ測って、正しいサイズを選んでください。

※製品の装着動画はこちらから見られます。



※お願い：本製品を廃棄する際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。
※製品の仕様、外観などは改良のため予告なく変更することがあります。
※製品には万全を期しておりますが、万一不良などお気づきの点がございましたら当社までご連絡ください。

日本シグマックス株式会社

〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1 お客様窓口：TEL.0800-222-7122(通話料無料)
受付時間：9時~17時(平日) ※土日、祝日、年末年始を除く

2022.08

ゴムスト

ZK-PROTECT

[ヒザ用サポーター]

使用説明書

ZAMST

安全にご使用いただくために、必ずご使用前に本使用説明書をお読みください。またいつでもお読みになれるよう大切に保管してください。

はじめにお読みください

- 本製品は左右兼用です。
- 本製品は使用状況によって、サポートできない場合があります。
- 本製品は治療用の製品ではありません。

ご使用にあたって

- 生地やしわなどがキズに見える場合がありますが、品質には問題ありません。
- 素材の特性上、保管状態により変色することがあります。
- 保管の際は、製品を強く押しつぶさないようにしてください。面ファスナーのつきが悪くなるおそれがあります。

2022.08
168843

【使用上の注意—必ずお読みください—】

本使用説明書では、安全に関わる注意事項をその危険の大きさの程度に応じて次のように分類しています。

警告

誤った使い方をすると、人が重傷を負う可能性がある内容

注意

誤った使い方をすると、人が軽傷を負うか、または本製品以外の他の財物に損害を与える可能性がある内容

警告

- 異常の発生や症状の悪化を防ぐため、次の場合は使用しないでください。
 - ・アレルギー体質の方や皮膚が過敏な方。
 - ・装着部に骨折、傷、しびれ、腫れ、湿疹などの異常がある場合。
 - 次のことを必ず守って正しく使用してください。正しく使用しないと、血行障害や負傷事故の原因となります。
 - ・ヒザ以外の部位に使用しないでください。
 - ・サイズの合った製品を使用してください。
 - ・就寝時は使用しないでください。
 - ・装着手順に従って正しく使用してください。
 - ・サポーター本体やストラップをきつく締めすぎないでください。
 - ・使用中にゆるんだりずれたりした場合は、正しく装着し直してください。
- また、長時間使用する場合は、過度の圧迫などに注意し、適宜装着し直してください。
- ・本製品が摩耗、損傷した場合や面ファスナーのつきが悪くなった場合は使用しないでください。
 - ・本製品の加工、改造、修理を行わないでください。
- 本製品の使用中に、ケガ、骨折、痛み、しびれ、腫れ、湿疹などの異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し、医師に相談してください。使用を続けると症状が悪化する原因となります。

注意

- 面ファスナーには硬い素材を使用しています。まれに指や肌を傷つける場合がありますので注意してください。
- 本製品は、汗や摩擦などにより色落ちや他の生地に色移りする場合があります。
- 面ファスナーが衣類につかないように装着してください。ほつれや伝線の原因となります。


【お手入れ方法】

注意


- 色の薄いものと一緒に洗濯しないでください。色落ちや他の生地に色移りする場合があります。
- 他の衣類などと一緒に洗濯する場合は、ほつれや伝線を避けるため、洗濯ネットを使用してください。

- 本製品は洗濯機で洗えます。洗濯後は日陰で吊り干しにしてください。
- 面ファスナーをとめて洗濯してください。とめずに洗濯すると、面ファスナーのつきが悪くなるおそれがあります。
- アイロン、塩素系漂白剤は使用しないでください。酸素系漂白剤は使用できます。
- 乾燥機は使用しないでください。製品をいためる原因となります。
- 本製品はドライクリーニングできません。また、ウェットクリーニングはできますがタンブル乾燥は避けてください。


【各部の名称】 ※図は右脚に装着しています。

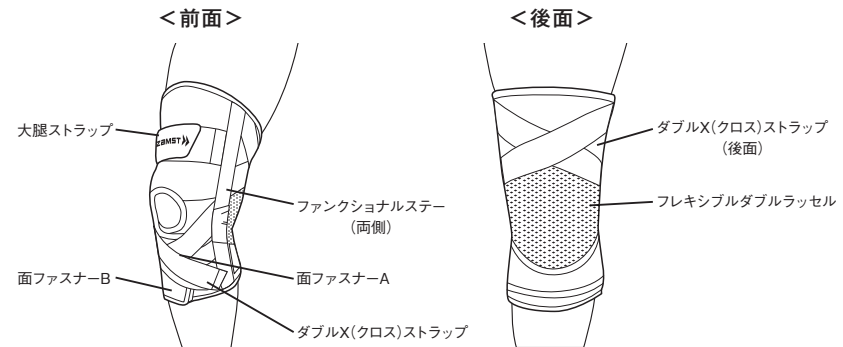


- 【装着手順】**
- 装着前に本使用説明書P.2の【使用上の注意—必ずお読みください—】をよく読んでから、手順通り正しく装着してください。
 - 以下の装着手順は右脚の場合です。

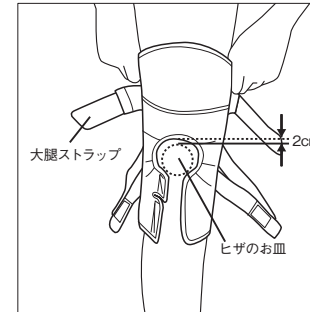

① 大腿ストラップを上にして両手で持ち、ヒザ穴の上部がヒザのお皿(膝蓋骨)の上端から2cmくらい上にくるまで履き上げます。

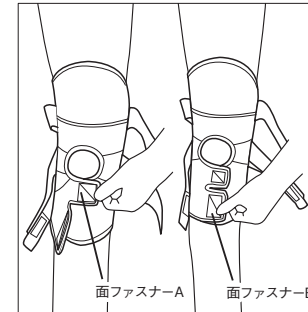


② ヒザをまっすぐに伸ばして、適度な圧迫となるように面ファスナーAおよび面ファスナーBをとめます。

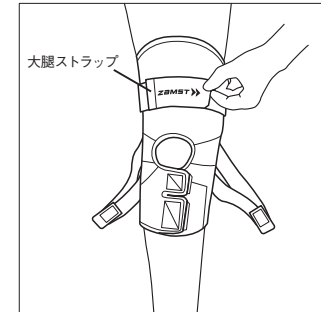


③ 適度な圧迫となるように大腿ストラップをとめます。


装着完了時

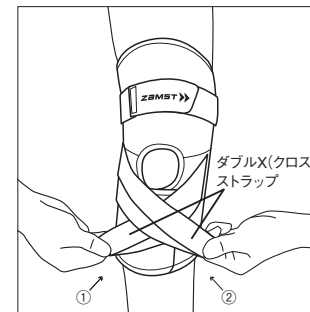

④ ダブルX(クロス)ストラップを下腿前面で①ヒザの内側、②ヒザの外側の順にとめます。

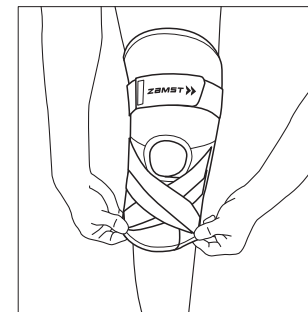

⑤ ヒザをまっすぐに伸ばして、サポーターを上下に引っ張り、前後のたるみを直します。

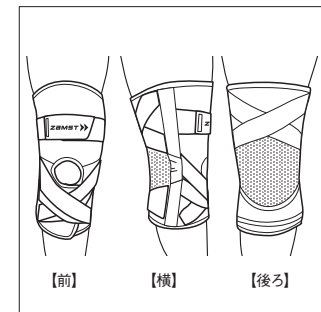

⑥ サポーターのゆるみやズレがないか、確かめてください。違和感がある場合は、再度、始めから装着し直してください。